

BonaDect

Temporärer Befestigungszement *ohne Eugenol*

Gebrauchsanweisung

Indikation

BonaDect ist ein leicht zu verarbeitender, provisorischer, eugenolfreier Befestigungszement auf Zinkoxidbasis, der die Aushärtung von Füllungs- und Befestigungsmaterialien auf Kunststoffbasis nicht beeinflusst. BonaDect fließt leicht und gestattet so ein einwandfreies, exaktes Einsetzen des Provisoriums. Die optimierten Materialeigenschaften von BonaDect sorgen dabei für einen sicheren Halt des Provisoriums bei gleichzeitig leichter Entfernbarkeit.

BonaDect wird in der Kartusche automatisch gemischt und direkt auf die Restauration bzw. in die Kavität appliziert. Eine manuelle Anmischung der beiden Komponenten ist nicht mehr nötig.

BonaDect dient zur provisorischen Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays.

Handhabung der Doppelspritze

Die Doppelspritze ermöglicht das automatische Dosieren und Mischen des Materials, was die zeitsparende Applikation des Befestigungsmaterials direkt in die Restauration ermöglicht. Bei Verwendung einer neuen Doppelspritze ist der Transportverschluss zu entfernen. Daraufhin ist die Mischkanüle aufzusetzen. Nach der Anwendung dient die Mischkanüle als Verschluss und kann bis zur nächsten Verwendung auf der Doppelspritze belassen werden. Erst bei erneuter Verwendung der Doppelspritze wird die Mischkanüle durch eine neue ersetzt.

Bei erstmaligem Gebrauch das zuerst aus der Mischkanüle ausgetretene Material (eine etwa erbsengroße Menge) verwerfen.

Verarbeitung

1. Reinigen Sie die Oberfläche der zu restaurierenden Zähne vor dem Zementieren z. B. mit Blmssteinpulver und Wasser.
2. Anschließend den präparierten Zahn spülen und mit Luft trocknen. Zu große Restfeuchtigkeit ist ebenso wie eine Übertrocknung zu vermeiden. Die Empfindlichkeit von Stümpfen kann durch die Anwendung desensibilisierender Mittel vermindert werden. Vor einer definitiven Befestigung sind diese Mittel allerdings restlos zu entfernen. Ebenso müssen bei einer späteren Herausnahme des Provisoriums alle Zementreste sorgfältig entfernt werden. Reste von BonaDect lassen sich leichter entfernen, wenn der Zement kurz mit Kältespray abgekühlt wird.
3. BonaDect kann direkt auf das Provisorium bzw. in die Kavität appliziert werden. Befestigen Sie das Provisorium mit leichtem Druck auf dem präparierten Zahn. Anschließend den Patienten langsam zubeißen lassen (eventuell Watterolle verwenden) und Okklusion überprüfen.

Entfernung von Überschüssen

Nach ca. 5 bis 6 min ist BonaDect soweit ausgehärtet, dass Überschüsse entfernt werden können. Beginnen Sie approximal mit dem Entfernen der Zementüberschüsse. Reste des Zementes lassen sich leichter entfernen, wenn dieser kurz mit Kältespray abgekühlt wird. Reinigen Sie anschließend die Zahnzwischenräume mit Zahnseide.

Bitte beachten:

- Sie sollten BonaDect nicht verwenden, wenn Allergien gegen Inhaltsstoffe bekannt sind, oder, wie in seltenen Fällen, Kontaktallergien existieren sollten.
- Hautkontakt mit der Paste vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser und Seife waschen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Das Produkt enthält Kolophonium.

Verarbeitungszeiten

0 min	Applikation auf das Provisorium bzw. die Präparation	5-6 min	Entfernen eventueller Überschüsse
0:30 min	Befestigung des Provisoriums auf dem präparierten Zahn	7 min	Der provisorische Zement ist vollständig ausgehärtet
1 min	Ende der Verarbeitungszeit		

Nebenwirkungen

In Einzelfällen ist eine Hypersensibilität gegen Komponenten des Materials nicht auszuschließen.

Zusammensetzung/Klassifizierung

Zinkoxid, Naturharze, Fettsäuren, Paraffin und in geringen Mengen Stabilisatoren und Additive
ISO 3107-2011 Type 1

Lagerung/ Handelsform

Nur bei Raumtemperatur lagern (15-25°C/ 59-77°F) Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr anwenden.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!
REF 6050-100 1 x 5-ml Doppelspritze, 5 Kanülen

MSDS Nr: # 4500

BonaDect 2020-1 / Stand: 28.01.2020

indigodental GmbH, Fahlkamp 5, 25421 Pinneberg, Germany

Vertrieb: BonaDent GmbH, Berner Str. 28, 60437 Frankfurt, Germany
Tel: 069-586 07 39 0, Fax: 069-586 07 39 31, Internet: www.bonadent.de,
E-Mail: bonadent@t-online.de

CE 0482



BonaDect ist eine Handelsmarke der Firma BonaDent GmbH