

# DinaBase<sup>®</sup>7 Haftgel für Zahnprothesen

## Und die Prothese ist kein Problem mehr Gebrauchsanweisung


**1** Um DinaBase<sup>®</sup>7 **geschmeidig zu machen**, muss es **erwärmt** werden: So einfach wie die Zubereitung einer Tasse Tee. Legen Sie die Tube DinaBase<sup>®</sup>7 in eine Tasse; gießen Sie **heißes Wasser** in die Tasse, bis es die Tube bedeckt. Der Schraubverschluss sollte nicht im heißen Wasser sein, damit Sie sich beim Herausnehmen der Tube nicht verbrühen. Belassen Sie die Tube DinaBase<sup>®</sup>7 **für 2 Minuten im heißen Wasser**. Während DinaBase<sup>®</sup>7 erwärmt wird, **reinigen** Sie die Zahnprothese **sorgfältig** und **bürsten** Sie sie mit Wasser und Seife ab. Anschließend **gut abtrocknen**. Es ist **sehr wichtig**, dass die Prothese vor dem Auftragen von DinaBase<sup>®</sup>7 **ganz sauber und trocken** ist. DinaBase<sup>®</sup>7 **haftet nicht auf der Zahnprothese**, wenn **Wasser, Speichel** oder **Essensreste** präsent sind.




**2** Nehmen Sie die Tube aus dem heißen Wasser heraus und **trocknen** Sie sie **gut ab**.

Wenn die Tube neu ist, entfernen Sie den Schraubverschluss und **durchbohren** Sie die Öffnung mit der im Verschluss befindlichen Spitze.


Für eine **vollständige Öffnung** ist ein **großes und rundes Loch** notwendig.

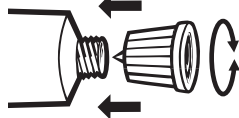

**3** Drücken Sie aus der Tube eine etwa **kirschgroße Menge** DinaBase<sup>®</sup>7.

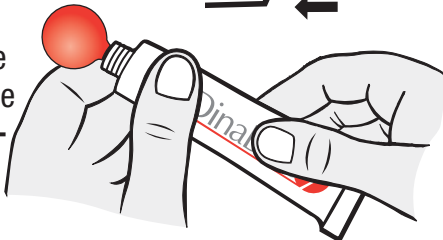


**4**

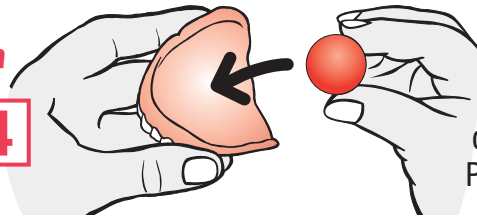

Tragen Sie diese Menge auf die Mitte der Prothese auf.

**5**

Verteilen Sie nun das Material mit beiden Daumen von der Mitte nach außen hin. Das Gel muss **gleichmäßig** auf die ganze Prothesenoberfläche **aufgetragen** werden.

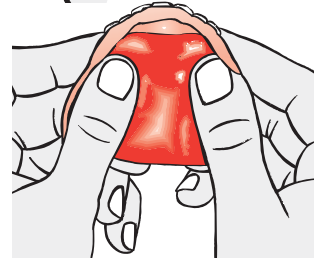

Achtung: Das Gel muss insbesondere an den Rändern der Prothese gut haften.

Vor dem Einsetzen der Prothese,

**6**

**den Mund mit reichlich Wasser spülen**. Nach dem Einsetzen der Prothese **beißen** Sie die Zähne **zusammen** (benutzen Sie nicht die Finger zum Andrücken) und führen Sie **mindestens eine Minute lang** ausgeprägte Lippenbewegungen durch. Auf diese Weise passt sich die Prothese **fehlerfrei** an und das überschüssige Material wird von den Rändern entfernt.



**Anmerkung:** Wenn Sie die Prothese in den Mund einsetzen und ein leichtes Brennen verspüren sollten, ist wahrscheinlich Ihr Zahnfleisch entzündet. Nehmen Sie die Prothese wieder heraus und spülen Sie sie ein paar Minuten unter kaltem Wasser ab. Vor dem Einsetzen den Mund erneut kalt ausspülen. Dadurch wird das brennende Gefühl beseitigt.

**7**

Um das Entfernen des überschüssigen Materials (welches über die Ränder hinaussteht) zu erleichtern, **spülen** Sie die Prothese **unter fließendem, kaltem Wasser ab**. Schneiden Sie nun mit einer kleinen Schere das überschüssige Material ab. Jetzt ist Ihre Zahnprothese fertig.




## Hervorragend auch für die untere Zahnprothese

Für die untere Prothese verfahren Sie wie beschrieben **gemäß den Punkten 1, 2 und 3**.

Formen Sie aus dem Ball eine kleine Wurst, verteilen Sie DinaBase®7 dann mit den Fingern und **drücken** Sie das Produkt insbesondere **an den Rändern zur besseren Haftung gut an**.

Übertreiben Sie nicht mit der Materialmenge.

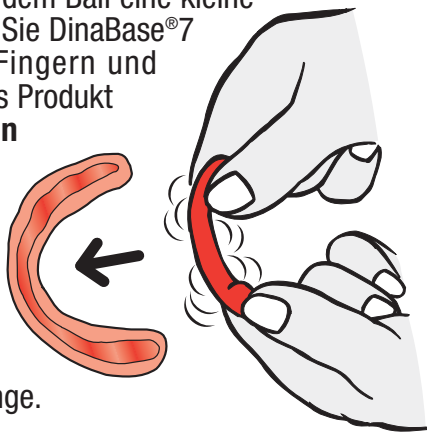

### Zusammensetzung:

hochviskose Lösung aus Polyvinyl-Acetat in Ethanol.

### Empfehlungen und Tipps

- Wenn Sie merken sollten, dass Sie zu wenig Material verwendet haben, können Sie ruhig weiteres Material hinzufügen.
- Trinken Sie in den ersten Stunden keine starken alkoholischen oder besonders heißen Getränke.

Nach einigen Anwendungen werden Sie wissen, wie viel Material Sie verwenden müssen, wie es verteilt werden muss und sogar wo Sie mehr überstehenden Rand lassen müssen, um Nahrungseintritte zu vermeiden, und wo weniger, um keine lästigen Reibungen entstehen zu lassen.

### Warnhinweise


- **Erneuern Sie DinaBase®7 innerhalb von 7 Tagen**, um die beste Hygiene zu garantieren, um mögliche Kolonisationen von Bakterien oder Pilzen und das Auftreten von Mundgeruch zu vermeiden.
- Das Produkt wird seit über 10 Jahren von Zahnärzten verwendet und es wurden keine Fälle von Allergien oder unerwünschten Reaktionen gemeldet. Unterbrechen Sie jedoch den Gebrauch, wenn ein Fall von Überempfindlichkeit auftreten sollte, und wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.

## Wie ist die Zahnprothese zu reinigen

Spülen Sie am ersten Tag nach dem Auftragen von DinaBase®7 die Zahnprothese nur mit kaltem Wasser ab und bürsten Sie die Prothese sanft mit einer gewöhnlichen Zahnbürste. Ab dem zweiten Tag können Sie Ihre Prothese in der gewohnten Technik abbürsten. Wenn Sie Reinigungstabletten benutzen, verwenden Sie nur solche mit schneller Wirkzeit (5-10 Minuten). Überschreiten Sie nicht die Wirkungszeit der Tablette.

### Um DinaBase®7 zu ersetzen

Tauchen Sie die Prothese für 5 Minuten in **sehr heißes Wasser** ein und lösen Sie dann das alte Material ab. Benutzen Sie dazu, wenn nötig, ein stumpfes Instrument, (z.B. einen Teelöffel), damit die Zahnprothese nicht zerkratzt wird.

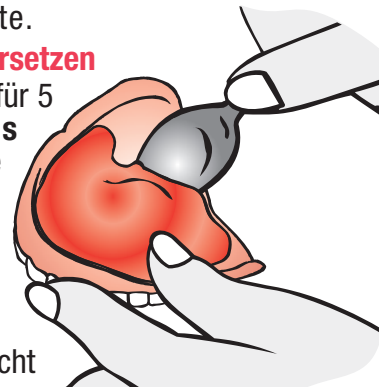

### Aufbewahrung:

Der Inhalt der Tube ist ausreichend für mehr als eine Anwendung. Nach dem Gebrauch den Schraubverschluss wieder fest auf die Tube schrauben. Bewahren Sie DinaBase®7 an einem kühlen Ort auf.

### Wichtige Hinweise:

Wenn das Produkt schwer aus der Tube kommt, **überprüfen Sie zuerst die Größe des gebohrten Loches** in der Tube. Ansonsten schrauben Sie die Kappe wieder zu und wiederholen Schritt 1.

**Um den Ball bearbeiten zu können**, müssen Sie Ihre **Hände gut waschen und säubern**, sonst **haftet DinaBase®7 nicht optimal an der Prothese**.

DinaBase®7 wird exklusiv hergestellt für Brux S.r.l. 21040 Cislago (VA), Italien, von: Dr. Pasini Chemisches Laboratorium - 20875 Burago Molgora (MB), Italien. Vertrieb: ARANDO OHG - Mühlenkamp 38 - 28844 Weye, Deutschland - Telefon: + 49 421 898 4628

Fax: + 49 421 898 4627  
www.arando-online.de  
office@arando-online.de

