

Kort brugsanvisning til fodkontrollen S-NW



CAN-Dongle



Kobling (parring)

Ved levering er fodkontrollen S-NW og CAN-donglen koblet med hinanden!

Isætning af CAN-donglen




① Sæt CAN-donglen i.



Vær opmærksom på positioneringen!

Udtagning af CAN-donglen

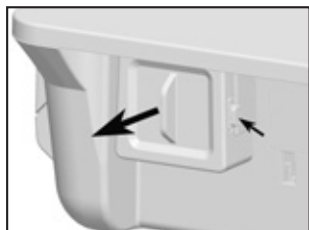

② Tryk på rastertuden i siden, og tag CAN-donglen ud.

CAN-dongle aktiveret



Ikonet ses på skærmen

- > CAN-donglen er isat
- > Styreenheden er tændt
- > Fodkontrollen betjenes


SPI-Dongle



BLÅ – kobling (parring)

Ved levering er fodkontrollen S-NW og SPI-donglen koblet med hinanden!

Isætning/udtagning af SPI-donglen

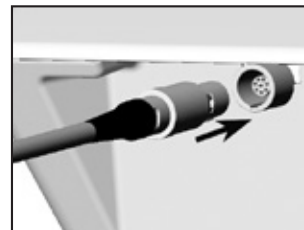

Vær opmærksom på positioneringen!

① Sæt SPI-donglen i, eller tag SPI-donglen ud af styreenheden.



② Fastgør SPI-donglen på stativet, eller tag SPI-donglen af stativet.



GRØN – SPI-dongle aktiveret

LED'en lyser, når SPI-donglen er sat i, og styreenheden er tændt.

ORANGE – batteri

LED'en blinker, når fodkontrollens batterier skal udskiftes.

BLÅ – kobling (parring)



Kort brugsanvisning til fodkontrollen S-NW



Udskiftning af batterier




SI-923, SI-915, SA-310, SA-320



SI-10xx, M-UK10xx



Åbn batterirummet.

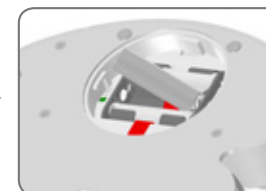


Sæt batterierne i.



Luk batterirummet.

CAN Dongle kobling

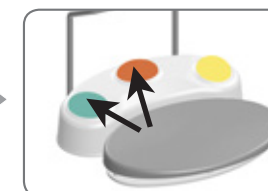

4 sekunder


SPI Dongle kobling



Mindst 3 sekunder



Den blå LED blinker

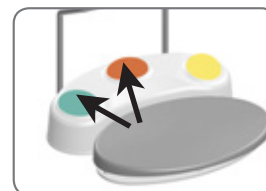


Mindst 3 sekunder



Den blå LED slukkes


Skift mellem styreenheder

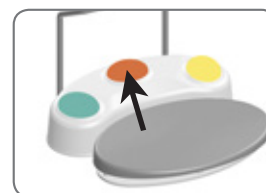

Mindst 3 sekunder



Sletning af kobling

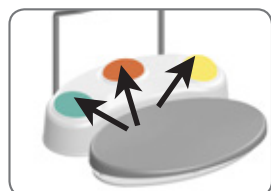

Mindst 3 sekunder