

Manual rápido del pedal de control S-NW


Llave CAN



Vinculación

Cuando el aparato se entrega de fábrica, el pedal de control S-NW y la llave CAN están acoplados.

Insertar la llave CAN

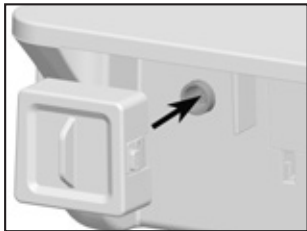


① Inserte la llave CAN.



Asegúrese de que la posición es la correcta.

Retirar la llave CAN

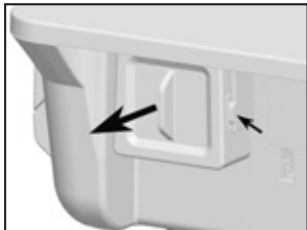

② Presione la empuñadura de encajado y retire la llave CAN.

Llave CAN activada



Icono visible en la pantalla

- > Llave CAN insertada
- > Unidad de control encendida
- > Pedal de control accionado


Llave SPI



Vinculación

Cuando el aparato se entrega de fábrica, el pedal de control S-NW y la llave CAN están acoplados.

Insertar o retirar la llave SPI

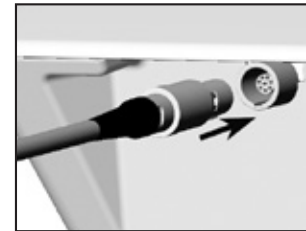

Asegúrese de que la posición es la correcta.

① Inserte la llave SPI o desconecte la llave SPI de la unidad de control.



② Fije la llave SPI en la varilla para suero o extraiga la llave SPI de la varilla para suero.



VERDE – Llave SPI activada

El LED está encendido cuando la llave SPI está insertada y la unidad de control está conectada.

NARANJA – Pila

El LED parpadea si las pilas del pedal de control tienen que cambiarse.

AZUL – Vinculación



Manual rápido del pedal de control S-NW



Cambio de la batería




SI-923, SI-915, SA-310, SA-320




SI-10xx, M-UK10xx



Abra el compartimento de la pila.

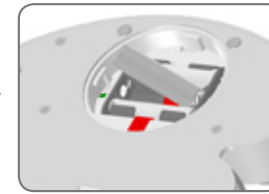


Coloque las pilas.

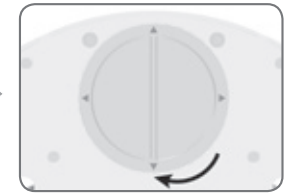


Cierre el compartimento de la pila.

Llave CAN Vinculaciòn

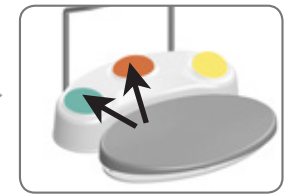


4 segundos


Llave SPI Vinculaciòn

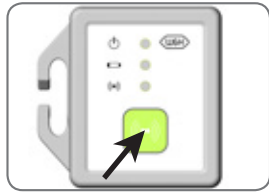


Al menos 3 segundos

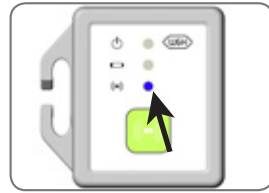

El LED azul parpadea

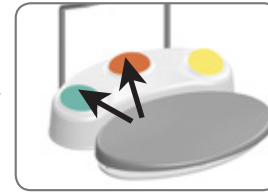


Al menos 3 segundos

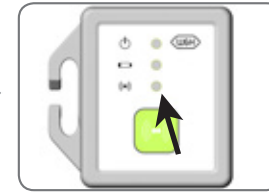

El LED azul se apaga


Cambiar entre unidades de control

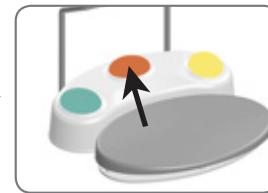

Al menos 3 segundos



Borrar Vinculaciòn

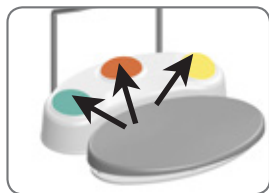

Al menos 3 segundos