

# Pikaopas, jalkakytkin S-NW


## CAN-donglen



### Kytkentä (parin muodostus)

Jalkakytkin S-NW ja CAN-dongle on kytketty yhteen toimitustilassa!

### CAN-donglen liittäminen

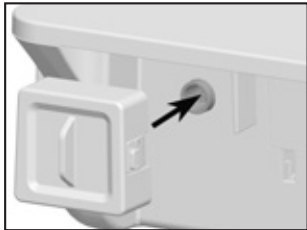


① Liitä CAN-dongle.



Huomioi oikea asento!

### CAN-donglen irrotus

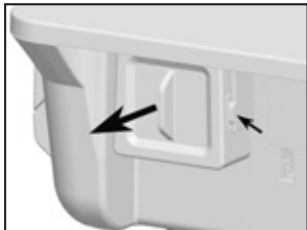

② Paina sivussa olevaa ohjaussalppaa ja poista CAN-dongle.

### CAN-dongle aktivoitu



Näytön kuvake näkyvissä

- > CAN-dongle liitetty
- > Ohjauslaite kytketty päälle
- > Jalkakytkintä painettu


## SPI-donglen



### Kytkentä (parin muodostus)

Jalkakytkin S-NW ja SPI-dongle on kytketty yhteen toimitustilassa!

### SPI-donglen liittäminen/irrotus

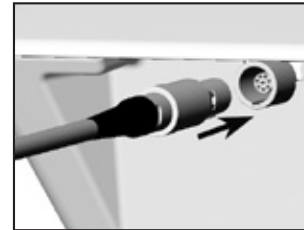

Huomioi oikea asento!

① Liitä SPI-dongle tai irtikytkke SPI-dongle ohjauslaitteesta.



② Kiinnitä SPI-dongle jalustaan tai poista SPI-dongle jalustasta.



### VIHREÄ – SPI-dongle aktivoitu

LED palaa, kun SPI-dongle on liitetty ja ohjauslaite on kytketty päälle.

### ORANSSI – paristo

LED vilkkuu, kun jalkakytkimen paristot on vaihdettava.

### SININEN – kytkentä (parin muodostus)



# Pikaopas, jalkakytкин S-NW



Pariston vaihto




SI-923, SI-915, SA-310, SA-320




SI-10xx, M-UK10xx



Avaa paristolokero.

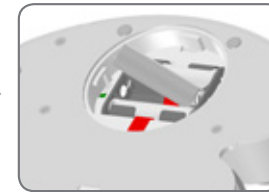


Aseta paristot paikoilleen.

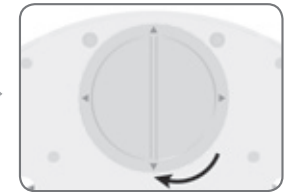

Lukitse paristokotelo.

CAN-donglen  
Kytкentä

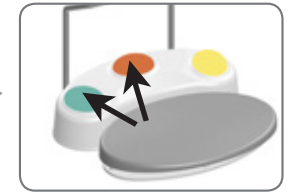

4 sekuntia


SPI-donglen  
Kytкentä




Vähintään 3 sekuntia



Sininen LED vilkkuu

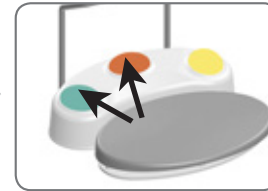


Vähintään 3 sekuntia

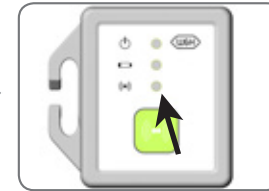

Sininen LED sammuu


Ohjauslaitteiden  
välillä  
vaihtaminen

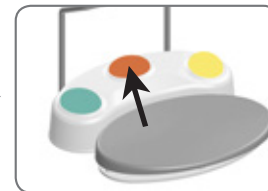

Vähintään 3 sekuntia



Kytкennän  
poistaminen

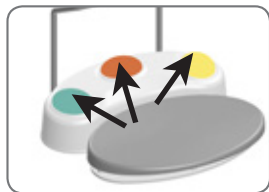

Vähintään 3 sekuntia