

Manuel abrégé pour la commande au pied S-NW

Dongle CAN



Couplage (pairage)

La commande au pied S-NW et le dongle CAN sont couplés à la livraison !

Connexion du dongle CAN




❶ Connectez le dongle CAN.



Vérifiez le positionnement !

Déconnexion du dongle CAN

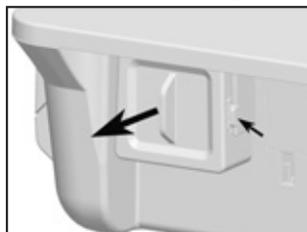

❷ Appuyez sur l'ergot latéral et déconnectez le dongle CAN.

Dongle CAN activé



Icône visible sur l'écran

- > Dongle CAN connecté
- > Boîtier de commande sous tension
- > Commande au pied actionnée


SPI-Dongle



Couplage (pairage)

La commande au pied S-NW et le dongle SPI sont couplés à la livraison !

Connexion / déconnexion du dongle SPI

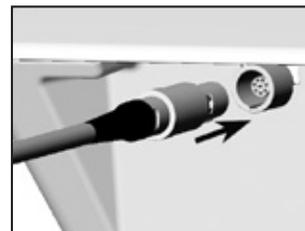

Vérifiez le positionnement !

❶ Connectez le dongle SPI ou déconnectez le dongle SPI du boîtier de commande.



❷ Fixez le dongle SPI à la potence ou déconnectez le dongle SPI de la potence.



VERT – Dongle SPI activé

La LED s'allume lorsque le dongle SPI est connecté et le boîtier de commande est sous tension.

ORANGE – Pile

La LED clignote lorsque les piles de la commande au pied doivent être remplacées.

BLEU – Couplage (pairage)



Manuel abrégé pour la commande au pied S-NW



Remplacement
des piles




SI-923, SI-915, SA-310, SA-320




SI-10xx, M-UK10xx



Ouvrez le compartiment
à piles.

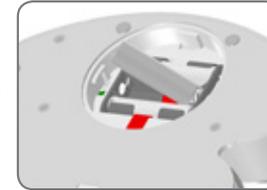


Insérez les piles.

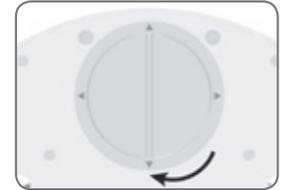

Verrouillez le compartiment
à piles.

Dongle CAN
Couplage

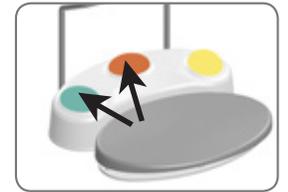


4 secondes


Dongle SPI
Couplage



Au moins 3 secondes

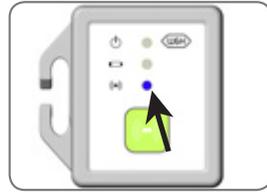

La LED bleue clignote

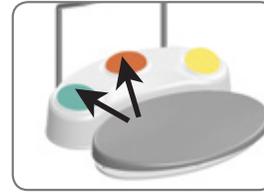


Au moins 3 secondes



La LED bleue s'éteint


Basculement
entre les boîtiers
de commande

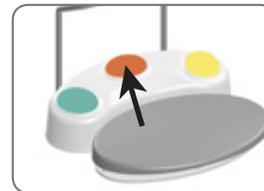

Au moins 3 secondes



Suppression
du couplage

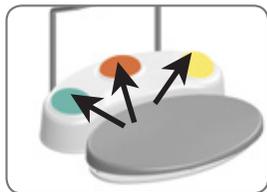

Au moins 3 secondes