

Guida rapida per il controllo al piede S-NW

Dongle CAN



Abbinamento (pairing)

Il controllo al piede S-NW e il dongle CAN forniti in dotazione sono già abbinati!

Inserimento del dongle CAN




❶ Inserire il dongle CAN.



Prestare attenzione alla disposizione!

Estrazione del dongle CAN

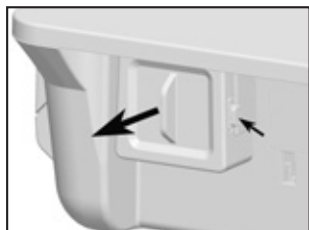

❷ Premere il blocco laterale ed estrarre il dongle CAN.

Dongle CAN attivato



Icona visibile sul display

- > Dongle CAN inserito
- > Unità di controllo accesa
- > Controllo al piede attivato


Dongle SPI



Abbinamento (pairing)

Il controllo al piede S-NW e il dongle SPI forniti in dotazione sono già abbinati!

Inserimento / estrazione del dongle SPI

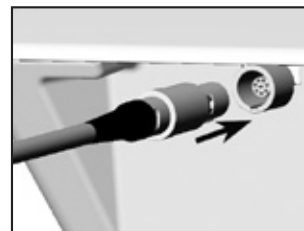

Prestare attenzione alla disposizione!

❶ Inserire il dongle SPI oppure staccare il dongle SPI dall'unità di controllo.



❷ Agganciare il dongle SPI sullo stativo oppure sganciare il dongle SPI dallo stativo.



VERDE – dongle SPI attivato

Il LED si accende quando il dongle SPI viene inserito e l'unità di controllo viene accesa.

ARANCIONE – Batteria

Il LED lampeggia quando le batterie del controllo al piede devono essere sostituite.

BLU – Abbinamento (pairing)



Guida rapida per il controllo al piede S-NW

