

Beknopte handleiding voor pedaal S-NW


CAN-Dongel



Koppeling (pairing)

Het pedaal S-NW en de CAN-dongel zijn bij de levering gekoppeld!

CAN-dongel aansluiten

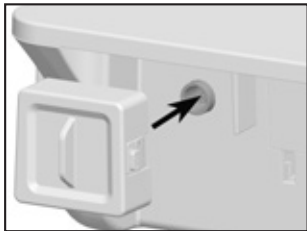


❶ Sluit de CAN-dongel aan.



Let op de plaatsing!

CAN-dongel afnemen

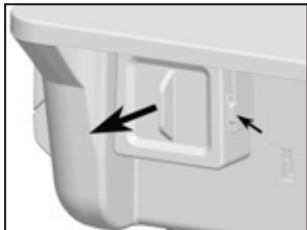

❷ Druk op de zijwaartse vastzetpal en neem de CAN-dongel af.

CAN-dongel geactiveerd



Pictogram zichtbaar op het display

- > CAN-dongel aangesloten
- > Besturing ingeschakeld
- > Pedaal ingeschakeld


SPI-Dongel



Koppeling (pairing)

Het pedaal S-NW en de SPI-dongel zijn bij de levering gekoppeld!

SPI-dongel aansluiten / afnemen

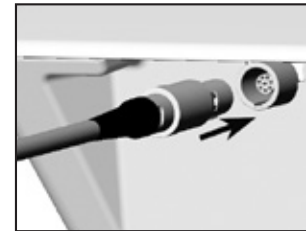

Let op de plaatsing!

❶ Sluit de SPI-dongel aan of scheid de SPI-dongel van de besturing.



❷ Zet de SPI-dongel vast op het statief of neem de SPI-dongel van het statief af.



GROEN - SPI-dongel geactiveerd

LED brandt als de SPI-dongel is aangesloten en de besturing is ingeschakeld.

ORANJE - batterij

LED knippert als de batterijen van het pedaal moeten worden vervangen.

BLAUW - koppeling (pairing)



Beknopte handleiding voor pedaal S-NW

