

Краткое руководство к блоку ножного управления S-NW



Электронный защитный ключ-заглушка CAN



Сопряжение (Pairing)

В состоянии при поставке блок ножного управления S-NW и электронный защитный ключ-заглушка CAN сопряжены!

Установка электронного защитного ключа-заглушки CAN




1 Вставьте электронный защитный ключ-заглушку CAN.



Соблюдайте корректное положение!

Извлечение электронного защитного ключа-заглушки CAN

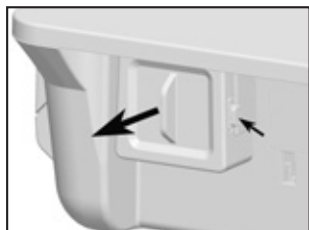

2 Надавите на фиксирующий выступ и извлеките электронный защитный ключ-заглушку CAN.

Электронный защитный ключ-заглушка CAN активирован



Пиктограмма, отображаемая на дисплее

- > Электронный защитный ключ-заглушка CAN установлен.
- > Блок управления включен.
- > Блок ножного управления активирован.


Электронный защитный ключ-заглушка SPI



сопряжение (Pairing)

В состоянии при поставке блок ножного управления S-NW и электронный защитный ключ-заглушка SPI соединены!

Установка/извлечение электронного защитного ключа-заглушки SPI

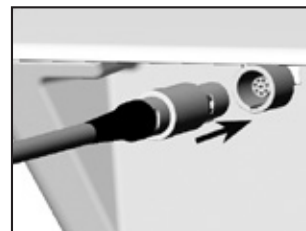

Соблюдайте корректное положение!

1 Вставьте электронный защитный ключ-заглушку SPI или отсоедините электронный защитный ключ-заглушку SPI от блока управления.



2 Зафиксируйте электронный защитный ключ-заглушку SPI на штативе или отсоедините электронный защитный ключ-заглушку SPI от штатива.



ЗЕЛЕНЫЙ светодиод — электронный защитный ключ-заглушка SPI активирован

Светодиод горит, когда электронный защитный ключ-заглушка SPI вставлен и блок управления включен.

ОРАНЖЕВЫЙ светодиод — батарейка

Светодиод мигает, если батарейки блока ножного управления необходимо заменить.

СИНИЙ светодиод — сопряжение (Pairing)



Краткое руководство к блоку ножного управления S-NW



Замена
батареек



SI-923, SI-915,
SA-310, SA-320



SI-10xx, M-UK10xx



Откройте отсек
для батареек.





Установите батарейки.



Закройте отсек
для батареек.

Электронный
защитный
ключ-
заглушка CAN
Сопряжение

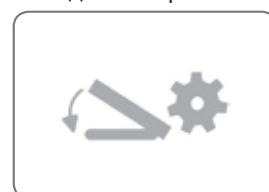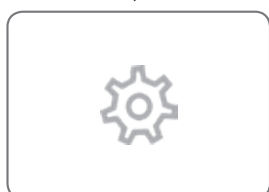

4 секунды


Электронный
защитный
ключ-
заглушка SPI
Сопряжение



Не менее 3 секунд



Синий светодиод
мигает

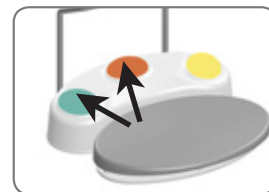


Не менее 3 секунд



Синий светодиод
гаснет


Переключение
между блоками
управления

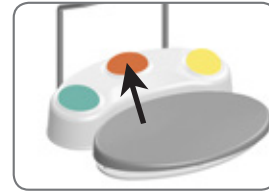

Не менее 3 секунд



Удаление
сопряжения

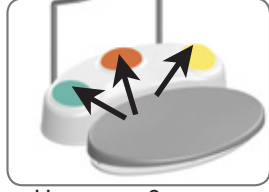

Не менее 3 секунд