

Snabbguide för fotkontroll S-NW



CAN-Dongle



Sammankoppling (pairing)

Fotkontrollen S-NW och CAN-dongeln är sammankopplade när de levereras!

Koppla på CAN-dongeln




1 Koppla på CAN-dongeln.



Var noga med placeringen!

Avlägsna CAN-dongeln

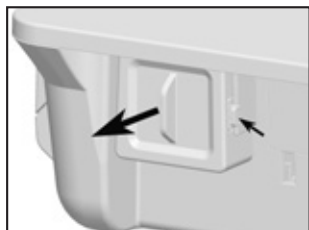

2 Tryck på låsklacken på sidan och avlägsna CAN-dongeln.

CAN-dongeln aktiverad



Ikon är synlig på displayen

- > CAN-dongeln påkopplad
- > Styrenhet inkopplad
- > Fotkontroll intryckt


SPI-Dongle



Sammankoppling (pairing)

Fotkontrollen S-NW och SPI-dongeln är sammankopplade när de levereras!

Koppla på/avlägsna SPI-dongeln

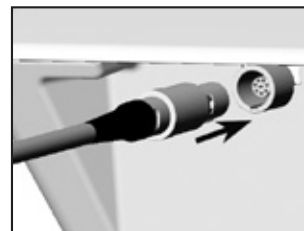

Var noga med placeringen!

1 Koppla på SPI-dongeln eller koppla ur SPI-dongeln från styrenheten.



2 Fixera SPI-dongeln på stativet eller avlägsna SPI-dongeln från stativet.



GRÖN – SPI-dongeln aktiverad

LED lyser när SPI-dongeln är påkopplad och styrenheten är inkopplad.

ORANGE – Batteri

LED blinkar när batterierna till fotkontrollen måste bytas ut.

BLÅ – sammankoppling (pairing)



Snabbguide för fotkontroll S-NW



Batteribyte



SI-923, SI-915, SA-310, SA-320



SI-10xx, M-UK10xx



Öppna batterifacket.



Sätt i batterierna.



Lås batterifacket.

CAN Dongle
sammankoppling



4 sekunder


SPI Dongle
sammankoppling



Minst 3 sekunder



Blå LED blinkar

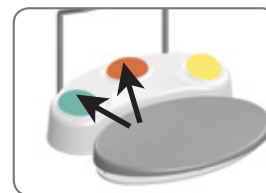


Minst 3 sekunder



Blå LED slocknar


Växla mellan
styrenheter

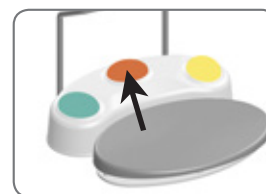

Minst 3 sekunder



Radera
sammankoppling

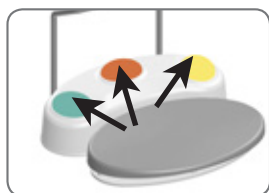

Minst 3 sekunder