

Kratka navodila za nožni krmilnik S-NW

Zaščitni ključ CAN



Spoj (Pairing)

Nožni krmilnik S-NW in zaščitni ključ CAN sta ob dobavi sklopljena!

Nameščanje zaščitnega ključa CAN




1 Namestite zaščitni ključ CAN.



Pazite na pravilni položaj.

Snemanje zaščitnega ključa CAN

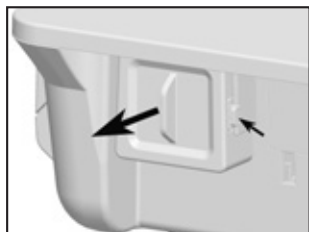

2 Pritisnite stransko zaskočko in snemite zaščitni ključ CAN.

Zaščitni ključ CAN aktiviran



Ikona na zaslonu vidna

- > Zaščitni ključ CAN nameščen
- > Krmilna naprava vklopljena
- > Nožni krmilnik aktiviran


Zaščitni ključ SPI



Spoj (Pairing)


Nožni krmilnik S-NW in zaščitni ključ SPI sta ob dobavi sklopljena!

Nameščanje/snemanje zaščitnega ključa SPI

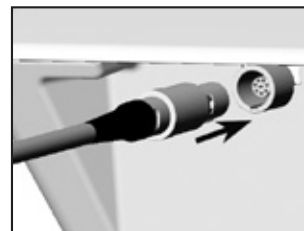

Pazite na pravilni položaj.

1 Namestite zaščitni ključ SPI ali ločite zaščitni ključ SPI od krmilnika.

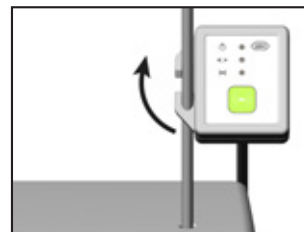

2 Pritrdite zaščitni ključ SPI na stojalo ali snemite zaščitni ključ SPI s stojala.



ZELENA – zaščitni ključ SPI aktiviran

Luč LED sveti, če je zaščitni ključ SPI nameščen in krmilna naprava vklopljena.

ORANŽNA – baterija

Luč LED utripa, če je treba zamenjati baterije nožnega krmilnika.

MODRA – spoj (Pairing)



Kratka navodila za nožni krmilnik S-NW



Zamenjava baterij



SI-923, SI-915, SA-310, SA-320



SI-10xx, M-UK10xx



Odprite predal za baterije.




Vstavite baterije.



Zaprte predal za baterije.

Zaščitni ključ CAN Spoj

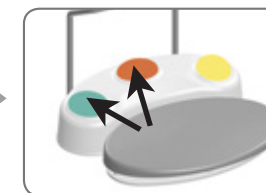

4 sekunde


Zaščitni ključ SPI Spoj



Najmanj 3 sekunde



Modra luč LED utripa

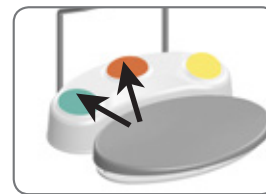


Najmanj 3 sekunde



Modra luč LED preneha svetiti


Preklapljanje med krmilnimi napravami

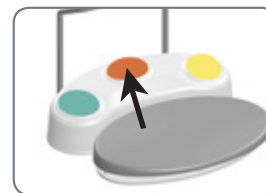

Najmanj 3 sekunde



Brisanje spoja

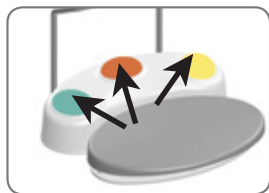

Najmanj 3 sekunde