


Käyttöohje

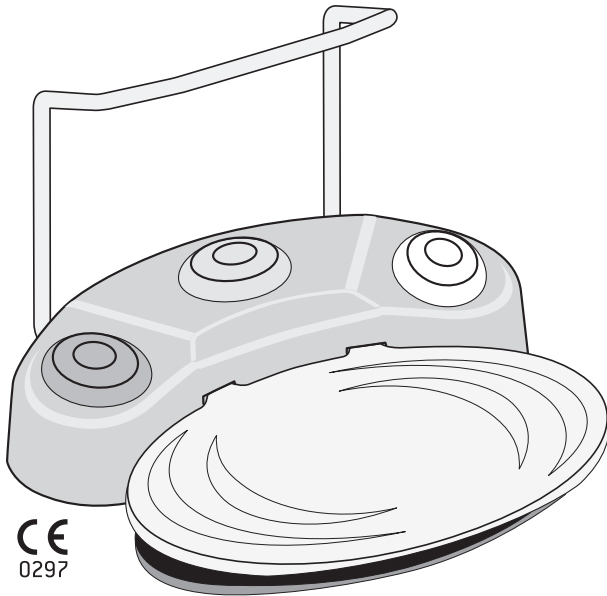

**Säädettävä
jalkakytin**

S-N1

Sisällys

W&H-symbolit.....	3
1. Johdanto.....	4 – 6
2. Toimituksen sisältö.....	7
3. Kaaren kiinnitys / irrotus.....	8
Takuuehdot.....	10
Valtuutetut W&H-huoltopisteet.....	11

W&H-symbolit

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit



VAROITUS!
[Loukkaantumisvaara]




HUOMIO!
[Vaurioitumisvaara]



Yleisiä ohjeita;
ei vaaraa henkilöille tai esineille

1. Johdanto

 W&H:n laatu politiikassa kiinnitämme erityisen huomion asiakkaitten tyytyväisyyteen. Tämä W&H:n tuote on kehitetty, valmistettu ja tarkastettu voimassa olevien laillisten säädösten ja määräysten mukaisesti.



Käytä jalkakytöntä ainoastaan

- > tässä käyttöohjeessa kuvattujen laitetyyppien kanssa
- > kunkin käyttölaitteen käyttöohjeiden mukaisesti



Noudata alla olevia kunkin käyttölaitteen käyttöohjeen lukuja:

- > Symbolit
- > Johdanto
- > Turvallisuusohjeita
- > Käyttöönotto
- > Jalkakytökimen kuvaus / käyttö
- > Hygienia ja välinehuolto
- > Lisävarusteet
- > Huolto
- > Tekniset tiedot
- > Kierrätys ja hävittäminen

Johdanto

Käyttötarkoitus

Säädettyjä jalkakytkeä käytettäväksi laitteissa, joissa on mekaaninen käyttölaite.



Tarkoituksen vastainen käyttö saattaa vahingoittaa jalkakytkeä ja aiheuttaa siten riskejä ja vaaratilanteita potilaalle, käyttäjälle tai muille henkilöille.



Epäasianmukainen käyttö

Epäasianmukainen käyttö tai virheellinen kokoaminen, asentaminen tai jalkakytkeä muuttaminen, korjaaminen tai antamien käyttöohjeiden laiminlyönti vapauttavat meidät kaikista takuu- ja muista vaatimuksista.



Jalkakytkeä

Jalkakytkeä on standardin IEC 60601-1 / ANSI/AAMI ES 60601-1 mukaan hyväksytty käytettäväksi alueella M (AP). Alue M käsittää pyramidikartion muotoisen osan sellaisen operointipöydän alapuolella, joka kallistuu 30° ulospäin.

Alue M, jota kutsutaan myös nimellä »lääkinnällinen ympäristö«, käsittää sen osan tiloista, joissa saattaa anestesiaan käytettyjen aineiden tai lääkinällisten ihonpuhdistus- tai desinfiointiaineiden käytön – kuitenkin vain pieninä määrinä ja lyhytaikaisesti – vuoksi esiintyä räjähdysalttiita kaasuseoksia.

Johdanto



EU-direktiivin mukainen tuotanto

Jalkakytкин on lääketieteellinen tuote EU-direktiivin 93/42/ETY mukaan ja sopii yhteen alla olevien käyttölaitteiden kanssa:

Tyypit	Nimike
SI-95	Implantmed, DU900, OsseoSetTM 100, Frios® Unit S
SA-200 / SA-200 C	Elcomed
SI-923, SI-915	Implantmed, BTI DrillTech®, Implant Unit, Ism, Surgical Motor System, OSM2, MIS MCU, DU1000, Frios® Unit S/i, OsseoSet 200, Osscora Surgical Set -kirurginen sarja
SA-310	Elcomed
PA-123 / PA-115	Tigon+



Valmistajan vastuu

Valmistaja voi pitää itseään vastuullisena jalkakytकिन turvallisuudesta, luotettavuudesta ja suorituskyvystä vain jos seuraavia ohjeet otetaan huomioon:

- > Käytä jalkakytकिनä ainoastaan tämän käyttöohjeen ja kunkin käyttölaitteen käyttöohjeen mukaisesti.
- > Jalkakytकिनessä ei ole osia joita käyttäjä saa korjata. Ainoastaan valtuutetut W&H-huoltopisteet (ks. s. 11) saavat suorittaa muutos- ja korjaustöitä.
- > Takuu- ja korvausehdot raukeavat, jos jalkakytकिन avataan sääntöjen vastaisesti.

2. Toimituksen sisältö

Tyypit SI-95 (Implantmed, DU900, OsseoSetTM 100, Frios® Unit S)

Tyypit SA-200, SA-200 C (Elcomed)

Jalkakytkin S-N1, REF 05083300

Tyypit SI-923, SI-915 (Implantmed REF 00900100 / 00900101 / 00900102 / 00900103 / 00900104 / 00900105 / 00900106 / 00900107), BTI DrillTech®, Implant Unit, Ism, Surgical Motor System, OSM2, MIS MCU, DU1000, Frios® Unit S/i, OsseoSet 200, Osscora Surgical Set -kirurginen sarja)

Jalkakytkin S-N1, REF 05046200

Tyyppi SA-310 (Elcomed)

Tyypit SI-923, SI-915 (Implantmed REF 16929000 / 16929001)

Jalkakytkin S-N1, REF 06202400


Tyypit PA-123, PA-115 (Tigon+)

Jalkakytkin S-N1, REF 06382200


Kaikille tyypeille

Kaari, REF 04653500


3. Kaaren kiinnitys / irrotus

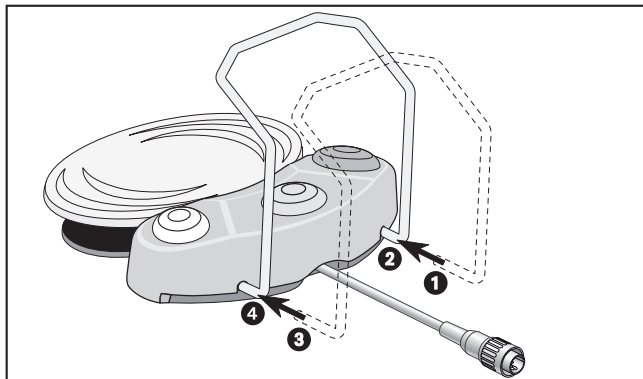

Kaaren kiinnitys

 Käännä jalkakytkintä 180°.

- 1 Aseta kaaren pidikeosa jalkakytkimen aukkoon.
- 2 Työnnä kaari sisään vastukseen saakka.
- 3 Aseta kaaren toinen pidikeosa jalkakytkimen aukkoon.
- 4 Työnnä kaari sisään vastukseen saakka.

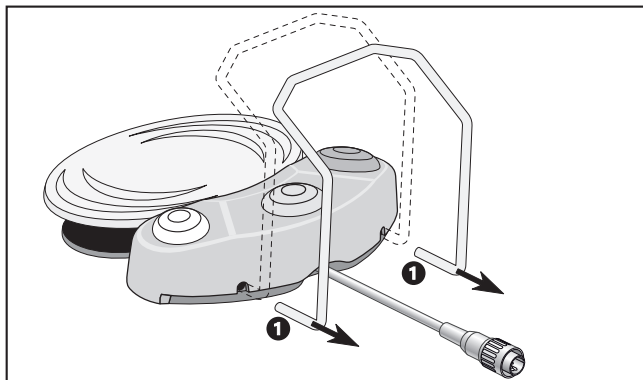

Kaaren irrotus

- 1 Vedä kaari ulos.

Takuuehdot

Tämän W&H tuotteen ovat mitä suurinta huolellisuutta noudattaen valmistaneet hyvinkoulutetut ammatti-ihmiset Monipuoliset testit ja valvontatoimenpiteet takaavat moitteettoman toiminnan. On otettava huomioon, että takuuvaatimukset ovat voimassa vain, kun noudatetaan tämän käyttöohjeen kaikkia ohjeita.

W&H on valmistajana vastuussa ostopäivästä lukien materiaali- tai valmistusvioista takuuajan, joka on 12 kuukautta.

Epäasiallisesta käytöstä johtuvista vioista tai korjauksista, jonka on tehnyt kolmas osapuoli, jota W&H ei ole valtuuttanut, emme vastaa!

Korvausvaatimukset on esitettävä – ostotodistuksen kanssa – toimittajalle tai valtuutettuun W&H-huoltopisteeseen. Korvauksen maksaminen ei pidennä takuu- tai mahdollista korvausvelvollisuusaikaa.

12 kuukauden takuu aika

Valtuutetut W&H-huoltopisteet

Vieraile W&H:n internetsivuilla osoitteessa <http://wh.com>

Valikkokohdasta »Service« (Huolto) löydät lähimmän valtuutetun W&H-pisteesi.

Jos pääsyä Internetiin ei ole, ota yhteys seuraaviin

W&H NORDIC AB, Tillverkarvägen 6, Box 7037, 187 11 Täby

t + 46 8 4458830, f + 46 8 4458833, E-Mail: service@whnordic.se

Valmistaja

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, **Austria**

t + 43 6274 6236-0, **f** + 43 6274 6236-55
office@wh.com **wh.com**

Form-Nr. 50587 AFI
Rev. 001 / 16.01.2012
Oikeudet muutoksiin pidätetään

