

## Descrizione & Applicazione

Pasta per lucidare contenente piccolissime particelle diamantate per la lucidatura finale di leghe ad alto contenuto aureo

## Vantaggi per il laboratorio dentale

1. Facilita una perfetta pulizia primaria senza rischi di alterazioni della superficie metallica.
2. La granulometria ottimale delle particelle diamantate permettono un lavoro più rapido e quindi un risparmio di tempo.
3. Legabril Diamond è pastoso. L'applicazione è dunque più facile sulle superfici del metallo e dei pennelli.
4. Può essere utilizzato con pennelli, feltrini, tamponi di pelle o di cotone.
5. È composto da un legante organico e da sostanze minerali innocue sia per l'utilizzatore che per l'ambiente.
6. Può anche essere utilizzato per lucidare lavori in resina.

## Modo d'uso

### Preparazione delle superfici metalliche:

Preparare accuratamente le superfici e le zone occlusali con strumenti rotativi (gomme, frese appuntite ecc.). Evitare le zone ritentive nella parte occlusale. La preparazione per una lucidatura finale perfetta è ottenuta con l'aiuto di un microscopio.

### Pre-pulizia:

Applicare una pasta di pre-pulizia su pennelli di durezza differente a seconda delle leghe da pulire. Lavorare a 5000–11000 g/min. imprimendo, con una piccola pressione, movimenti rotativi.

### Lucidatura primaria:

Stendere una piccola quantità di Legabril Diamond con un pennello. Cominciare a 5000–7000 g/min. esercitando una leggera pressione sulle superfici del metallo da pulire con movimenti rotativi, fino ad ottenere brillantezza.

### Lucidatura finale:

Per realizzare con Legabril Diamond una perfetta lucidatura extra-brillante, utilizzare dei tamponi di cuoio o di cotone e pulire le superfici a 5000–11000 g/min.

### Consigli di prudenza

Evitare di respirare di polvere, lavorare in un locale aerato o ventilato.

S2 – Conservare fuori della portata dei bambini.

S26 – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S39 – Proteggersi gli occhi/la faccia.

Xn



nocivo

Contiene: Distillato del petrolio

R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

S2 Conservare fuori della portata dei bambini.

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S39 Proteggersi gli occhi/la faccia.

Disponibilità

08052307 Legabril Diamond, 50g



Rx only