



Crown-Click

Set- 6 teilig mit 3 Ansätzen und 2 Schlüsseln

REF 06809

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH,
D-73479 Ellwangen

LOT siehe Instrument



Single-Loop Tip

Set mit je 1 Single-Loop Tip, Adapter, Schlüssel und Ersatzseil

REF 06817

① Ersatzschleufe 90mm
Set mit 2 Stück

REF 06818


② Adapter 1 Stück

REF 06820

③ Schlüssel 1 Stück

REF 06821

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH,
D-73479 Ellwangen

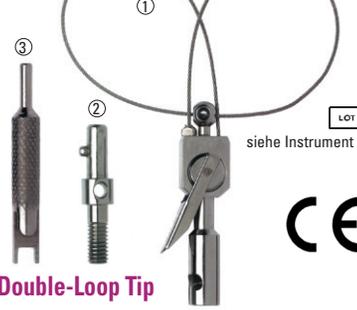

Double-Loop Tip

Set mit je 1 Double-Loop Tip, Adapter, Schlüssel und Ersatzseil

REF 06816

① Ersatzschleufe 190mm
Set mit 2 Stück


REF 06819

② Adapter 1 Stück

REF 06820

③ Schlüssel 1 Stück


REF 06821

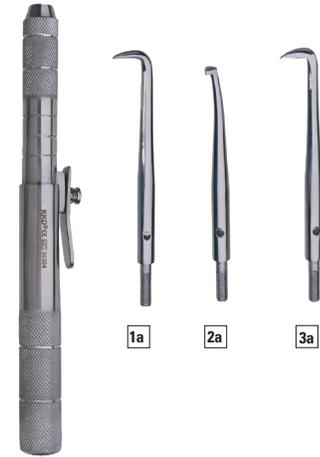

Crown-Ex

Set- 5 teilig mit 3 Ansätzen und 1 Schlüssel

REF 06815

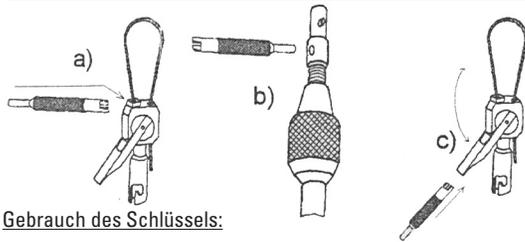

Gebrauch des Schlüssels:

- Schraube an der Drahtschlinge mit dem Schlüsselmaul im Halter festziehen
- Festdrehen des Adapters im Kronen- und Brückenentferner (Stift in das Adapterloch stecken und drehen)
- Hebel am Halter fest andrücken (dazu Schlitz auf den Hebel schieben)







LOT siehe Instrument

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH,
D-73479 Ellwangen

Kronenentferner n. Miller
Set mit 3 Ansätzen

REF 06822

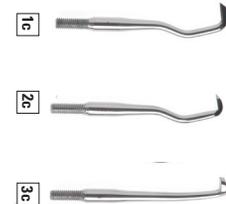

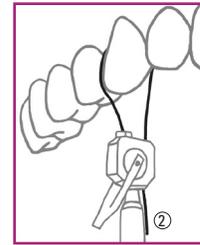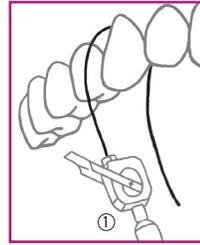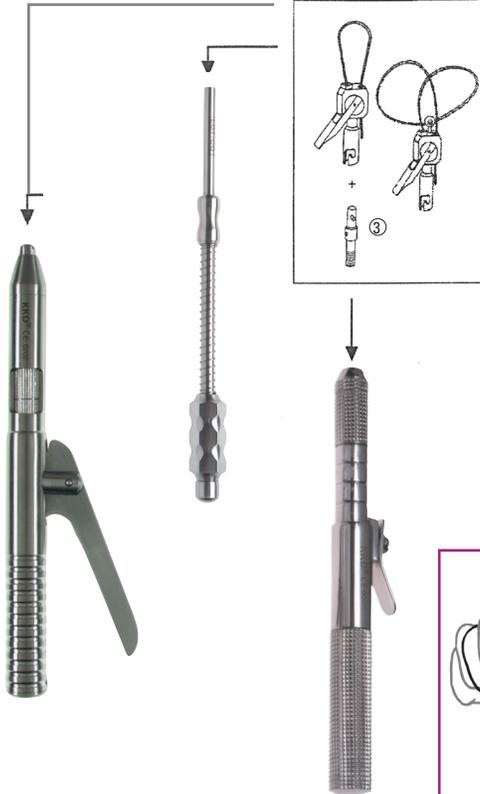


Instrumente vor Anwendung
reinigen und sterilisieren
5 Minuten bei 134°C und 3 Bar

Single-Loop Tip Gebrauchshinweise:

1. Schraube an der Drahtschlinge in das Gewinde am Halter eindrehen und mit dem Schlüssel festziehen
2. Das freie Ende der Drahtschlinge zwischen Zahn und Gingiva unter dem Kronenrand bzw. Brückenglied durchführen und bei hochgeklapptem Hebel (1) in die Bohrung am Halter einfädeln
3. Hebel fest nach unten drücken (2) – Drahtschlinge ist jetzt fest mit Halter verbunden.
4. Adapter in den Kronen- und Brückenentferner einschrauben
5. Verbindung mit dem Halter über den Bajonettverschluß herstellen (3) (einstecken und bis zum Einrasten drehen)

Vorteil: Halter kann in situ verbleiben, während der Kronen- und Brückenentferner für das Spannen durch einfaches Drehen aus dem Bajonettverschluß gelöst werden kann (speziell bei Crown-Ex sinnvoll)

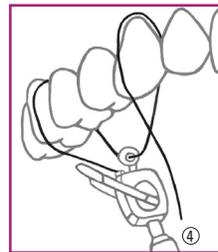

Double-Loop Tip Gebrauchshinweise:

1. Schraube an der Drahtschlinge in das Gewinde am Halter eindrehen und mit dem Schlüssel festziehen
2. Das freie Ende der Drahtschlinge zunächst zwischen Zahn und Gingiva unter dem Kronenrand bzw. Brückenglied durchführen,
3. dann durch die dem Halter aufgesetzte Öse fädeln (4) und
4. das freie Ende der Drahtschlinge erneut zwischen Zahn und Gingiva unter dem Kronenrand bzw. Brückenglied durchführen (in angemessenem Abstand zur ersten schlinge!)
5. und schließlich bei hochgeklapptem Hebel in die Bohrung am Halter einfädeln
6. Hebel fest nach unten drücken – Drahtschlinge ist jetzt fest mit Halter verbunden (2)
7. Adapter in den Kronen- und Brückenentferner einschrauben (3)
8. Verbindung mit dem Halter über den Bajonettverschluß herstellen (3)(einstecken und bis zum Einrasten drehen)

Vorteil: Halter kann in situ verbleiben, während der Kronen- und Brückenentferner für das Spannen durch einfaches Drehen aus dem Bajonettverschluß gelöst werden kann (speziell bei Crown-Ex sinnvoll)