

## Actueel WG/GA van het middel mikrozyd AF wipes, 14020 N

1 mei 2020

A.

### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

1. Bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en schimmels op harde oppervlakken in:
  - Ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg;
2. Bacteriën (excl. Bacteriesporen), en mycobacteriën, gisten en schimmels op harde oppervlakken (incl. apparaten en materialen) in
  - Ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
  - Productie ruimtes in de farmaceutische en cosmetische industrie;

met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Algemeen:

mikrozyd AF wipes is een gebruiksklaar product en is bestemd voor desinfectie van harde oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg en productie ruimtes voor farmaceutica en cosmetica. Behandel geen oppervlakken die gevoelig zijn voor alcohol, o.a. acryl glas e.d..

#### Toepassing:

Volg de hygiëne voorschriften van de fabrikant tijdens het bijvullen en invoegen van het eerste doekje. De te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Bevochtig de te behandelen oppervlakken met de geïmpregneerde doekjes en zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken gedurende de aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd blijven. Het product verdampt volledig. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.

Na gebruik de verpakking van de doekjes goed afsluiten

Dosering: Gebruik zoveel mikrozyd AF wipes dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd bevochtigd blijven:

1 doekje is geschikt voor circa 0,3 m<sup>2</sup> oppervlak.

Minimale inwerktijd:

Bacteriën, mycobacteriën en gisten: 1 min.

Schimmels: 5 min.

Waarschuwing:

Ontvlambaar, houd verwijderd van open vuur.

## BIJLAGE III WG/GA van het middel mikrozyd® AF wipes *Jumbo*

### A.

#### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

1. Bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en schimmels op harde oppervlakken in:
  - Ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg;
2. Bacteriën (excl. Bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en schimmels op harde oppervlakken (incl. apparaten en materialen) in
  - Ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
  - Productie ruimtes in de farmaceutische en cosmetische industrie;

met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor.

### B.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

##### Algemeen:

mikrozyd AF wipes *Jumbo* is een gebruiksklaar product en is bestemd voor desinfectie van harde oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg en productie ruimtes voor farmaceutica en cosmetica. Behandel geen oppervlakken die gevoelig zijn voor alcohol, o.a. acryl glas e.d..

##### Toepassing:

Volg de hygiëne voorschriften van de fabrikant tijdens het bijvullen en invoegen van het eerste doekje. De te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Bevochtig de te behandelen oppervlakken met de geïmpregneerde doekjes en zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken gedurende de aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd blijven. Het product verdampt volledig. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.

Na gebruik de verpakking van de doekjes goed afsluiten. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.

Dosering: Gebruik zoveel doekjes dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd bevochtigd blijven:

1 doekje is geschikt voor circa 0,5 m<sup>2</sup> oppervlak.

##### Minimale inwerktijd:

Bacteriën, mycobacteriën en gisten: 1 min.

Schimmels: 5 min.

##### Waarschuwing:

Ontvlambaar, houd verwijderd van open vuur.

## BIJLAGE III WG/GA van het middel mikroqid® AF wipes *premium*

### A.

#### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

1. Bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en schimmels op harde oppervlakken in:
  - Ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg;
  
2. Bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en schimmels op harde oppervlakken (incl. apparaten en materialen) in
  - Ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
  - Productie ruimtes in de farmaceutische en cosmetische industrie;

met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor.

### B.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

##### Algemeen:

mikroqid AF wipes *premium* is een gebruiksklaar product en is bestemd voor desinfectie van harde oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg en productie ruimtes voor farmaceutica en cosmetica. Behandel geen oppervlakken die gevoelig zijn voor alcohol, o.a. acryl glas e.d..

##### Toepassing:

De te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.

Bevochtig de te behandelen oppervlakken met de geïmpregneerde doekjes en zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken gedurende de aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd blijven. Het product verdampt volledig. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.

Na gebruik de verpakking van de doekjes goed afsluiten. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.

Dosering: Gebruik zoveel doekjes dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd bevochtigd blijven:

1 doekje is geschikt voor circa 0,5 m<sup>2</sup> oppervlak.

##### Minimale inwerktijd:

Bacteriën, mycobacteriën en gisten: 1 min.

Schimmels: 5 min.

##### Waarschuwing:

Ontvlambaar, houd verwijderd van open vuur.