

de

KaVo PROPHYflex Perio Powder
Mat.-No. 1.009.3732

INSTRUCTIONS FOR USE
1.009.5768 – 20180517 – 06 **01/03**



Bevor Sie dieses Produkt verwenden, bitte lesen Sie die Anweisungen in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und folgen Sie den Empfehlungen. Beachten Sie dabei besonders die Sicherheitshinweise.

Produktbeschreibung

Das KaVo PROPHYflex Perio Powder wird für subgingivale Behandlungen verwendet inklusive Parodontitis- und Periimplantitistherapien. Das KaVo PROPHYflex Perio Powder ist zur Verwendung in den handelsüblichen Pulverstrahlgeräten bestimmt. Bei der Bedienung des Gerätes beachten Sie bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsinformation ist für die Dauer der Verwendung des Produktes aufzubewahren.

Anwendungen

Dieses Pulver entfernt subgingivalen Biofilm und wird für die folgenden Reinigungsverfahren empfohlen:

- Entfernung von parodontalem Biofilm.
- Erhaltung von Implantaten (einschließlich Titanpolitur).
- Zur Weiterbehandlung nach der ersten Anwendung in der Parodontaltherapie.



Konkremente und Zahnstein können mit dem KaVo PROPHYflex Perio Powder nicht entfernt werden.


Behandlungshinweise



Bei flachen Parodontaltaschen (bis zu 5 mm) besprühen sie jede Seite des Zahnes für max. 5 Sekunden pro Tasche. Richten Sie den Strahl nicht auf einen Punkt, sondern bewegen Sie ihn kreisförmig, um eine gleichmäßige Reinigung zu erreichen.



Der Winkel von Handstückspitze zum Zahn kann zwischen 30° und 60° betragen. Je kleiner der Winkel, desto weiter wird das Pulver in die Tasche gesprüht.

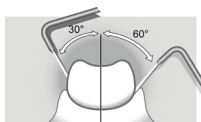

Kontraindikationen



Patienten, die an chronischer Bronchitis oder Asthma leiden, dürfen unter keinen Umständen mit einem Pulverstrahlgerät behandelt werden. Der Strahl aus Luft und Pulver könnte Atemschwierigkeiten verursachen.



Anfällige Personen können empfindlich auf Glycin reagieren. Wenn allergische Reaktionen beobachtet werden, brechen Sie die Behandlung und die Verwendung des Produktes ab und entfernen Sie das Pulver vollständig aus dem Mund.



Die Behandlung tiefer Parodontaltaschen kann zu einer Bakteriämie führen. Bitte bedenken Sie daher die notwendige Einschränkungen für die Behandlung von Risikopatienten (allgemein geschwächtes Immunsystem, Endokarditis).



Richten Sie den Pulverstrahl nicht auf Füllungen oder Kronen und Brücken, da dies die Restaurationen beschädigen könnte.

Behandlungshinweise



Patient und Behandler müssen Augenschutz tragen.



Der Behandler muss einen Mundschutz und Handschuhe tragen.



Verwenden Sie die grosse Absaugkanüle Ihrer Dentaleinheit.



Geben Sie Vaseline® auf die Lippen des Patienten.



Waschen Sie sich die Hände nach der Verwendung des Glycin Pulvers.



Reinigen Sie das Gesicht des Patienten nach der Verwendung des Glycin Pulvers (z. B. mit einem Feuchttuch).

Allgemeine Informationen

- Überschreiten Sie nicht die auf dem Behälter angegebene maximale Füllhöhe für das Pulver.
- Dieses Pulver ist zuckerfrei.

Lagerung und Haltbarkeit



Lagertemperatur: -10 °C bis +25 °C (14 °F bis +77 °F)



Transporttemperatur: -10 °C bis +60 °C (14 °F bis +140 °F)



Vor Nässe schützen.



Relative Luftfeuchte: 5 % bis 95 % nicht kondensierend.



Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa (10 psi bis 15 psi).

Verfallsdatum beachten.

Symbole



GOST Zeichen.



Gebrauchsanweisung beachten.



Recycelbar.



CE-Zeichen (Communauté Européenne). Ein Produkt mit diesem Zeichen entspricht den Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinie.



Hersteller.



Herstelldatum.



Produktionscharge.



Menge.



Nicht wiederverwenden - nur zum einmaligen Gebrauch



KaVo PROPHYflex Perio Powder vor Gebrauch schütteln.

- Das Pulver sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen gelagert werden.
- Lagerung bei -10°C bis 25°C und 10% bis 95% relativer Luftfeuchte.
- Pulver vor Gebrauch schütteln
- Pulverbehälter nach Gebrauch wieder mit dem Deckel verschließen
- Pulver ist 2 Jahre anwenderbar.

Ebenfalls erhältlich für supragingivale Behandlung:

- PROPHYflex Pulver® erhältlich in Orange (Mat.-Nr. 1.007.0014), Berry (Mat.-Nr. 1.007.0015), Cherry (Mat.-Nr. 1.007.0016) und Mint (Mat.-Nr. 1.007.0017).
- PROPHYpearls® (Mat.-Nr. 1.002.0342)