

RH Core Forms - Stumpfaufbauhülsen

RH-Core-Forms Stumpfaufbauhülsen unterscheiden sich aufgrund der Flexibilität und Elastizität deutlich von anderen Systemen:

- die durchsichtigen RH-Core Polyäthylenmatrizen sparen Zeit durch geringe Beschleifarbeit.
- die elastische, flexible und dünnwandige Hülse ist leicht abnehmbar
- der Materialverbrauch reduziert sich erheblich
- Haftet an keinem Kunststoff!
- Geringeres Risiko der Beschädigung der Nachbarzähne während der Präparation
- Konuswinkel 12,5°, in sechs unterschiedlichen Größen lieferbar



Das Verfahren, z.B. mit *Culmat AT Dual Soft*, dem dualhärtenden Stumpfaufbauwerkstoff:

1. Restsubstanz des Zahnes grob präparieren.
2. Aufbereiten des Wurzelkanals und Zementieren des Wurzelstiftes, ggf. Bonding auftragen (z.B. **NovaBond Dual**).
3. Eine passende RH Core Form in der Höhe anpassen (zervikal abschneiden und inzisal perforieren).
4. Die Matrice mit dem Stumpfaufbauwerkstoff, z.B. **Culmat AT Dual Soft**, füllen und auf der Restsubstanz des Zahnes fixieren. Gemäß Gebrauchsanweisung polymerisieren. Danach kann die Feinpräparation erfolgen.

