



Speikofil-Aqua

Wasseranmischbarer Glasionomerzement

CE 0482

Zusammensetzung:

Enthält Siliciumdioxid, Calciumoxid, Aluminiumoxid, Eisenoxid (Farbstoff), Polyacrylsäure.

Anwendungsgebiete:

- Für Unterfüllungen
- Zur Milchzahnbehandlung
- Für Aufbaufüllungen
- Für Frontzahnfüllungen im sichtbaren Bereich für Kavitäten der Black-Klasse III (seitliche Füllungen ohne Einbeziehung der Schneidekante)
- Für Füllungen der Black-Klasse V (Zahnfleischfüllungen)
- Zur Behandlung von Wurzelkaries

Gegenanzeigen:

- Wegen möglicher Pulpaschädigung nicht auf das pulpanahe Dentin bzw. die eröffnete Pulpa aufbringen
- Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe

Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Speikofil-Aqua wird mit destilliertem Wasser mit einem Metall- oder Kunststoffspatel angemischt. Ein Tropfen Wasser bindet ca. 2,5 Dosierlöffel des Pulvers. Das Mischungsverhältnis beträgt 5,12 g bis 5,53 g Pulver zu 1 g Wasser. Der Mischvorgang sollte nach ca. 0,5 Minuten abgeschlossen sein.

Die Oberflächen der Kavität für die Füllung vorbereiten, reinigen und trocknen, so dass der Zement sofort nach dem Mischen eingebracht werden kann. Dabei ist der Zutritt von Feuchtigkeit unbedingt zu vermeiden.

Die Verarbeitungszeit nach dem Anmischen beträgt 2 Minuten. Bei optimalem Mischungsverhältnis beginnt nach 4–5 Minuten die Aushärtung.

Nach ca. 7 Minuten ist die Füllung polierfähig.

Ein ordnungsgemäßes Abbindeverhalten kann anhand der Reste auf der Glasplatte geprüft werden.

Hinweise:

Das Pulver enthält Polyacrylsäure, die Verätzungen hervorrufen kann.

Bei versehentlichem Kontakt mit Haut, Schleimhäuten bzw. Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.

Das Pulver trocken aufbewahren, die Flasche fest verschließen.

Nach 2 Stunden ist die Füllung belastungsfähig.

Speikofil-Aqua darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

Lagerung bei Raumtemperatur.

Handelsform:

Speikofil-Aqua Farbe B3

Inhalt: 40 g

Art.-Nr. 1470

Zubehör: Dosierlöffel für Pulver

Stand der Information: Januar 2017