


SteamSensor DAC

Papierfrei!

Spezielles chemisches Indikatorsystem zur Überwachung der Dampfsterilisation des Sirona DAC Universal

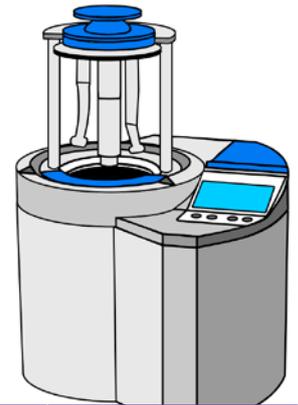

Verwendungszweck

Indikatorsystem nach DIN EN ISO 11140-1 Klasse 5 zur Überwachung des Sterilisationszyklus des Sirona DAC Universal.

Produkt	Best.-Nr.	Packungsgröße	Lagerung	Haltbarkeit
SteamSensor DAC	212003	250 Stück	Dunkel, trocken, bei Raumtemperatur	2 Jahre ab Herstellerdatum

Anleitung / Durchführung

Den SteamSensor DAC in den Bügel am Indikatorhalter einklemmen. Den Aufbereitungszyklus starten. Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung des Sirona DAC Universal aufgeführt.



Fehlerfreier Sterilisationszyklus



Fehlerhafter Sterilisationszyklus



* Farbkarte im Deckel der Verpackung

Auswertung

Nach Beendigung des Aufbereitungszyklus den Indikator auf korrekten Farbumschlag prüfen*.

Dokumentation

Indikator auswerten und das Ergebnis in das Sterilisationsbuch (Best.-Nr. 810001) eintragen, den Indikator verwerfen.