

Tissue Management vor der Abformung, mit ViscoStat, Astringedent oder Astringedent X und Ultrapak Step by Step



Die Materialien:



ViscoStat, Astringedent, Astr. X	Dento Infusor	Ultrapak-Fäden
Eisensulfat- bzw. Eisensub-sulfat-Präparate, wirken adstringierend und koagulieren Blut blitzschnell; gewebefreundlich; zum Einreiben mit Dento Infusor Tip bzw. zum Tränken der Ultrapak-Fäden. Aus den 30 ml-IndiSpense-Spritzen werden die 1,2 ml-Spritzen gefüllt.	1,2 ml-Spritze mit Dento Infusor Tip, gefüllt mit ViscoStat, Astringedent oder Astringedent X, zum Ausreiben des Sulcus, dadurch Erzeugung von Mikro-Koageln, die die Kapillaren verschließen. Zur Blutstillung optimal: Metal Dento Infusor Tip.	Retraktionsfäden in 6 Stärken, gestrickt, nicht gedreht oder geflochten, sehr geschmeidig, leicht zu legen, schlauchförmig, dadurch saugfähig und sulcuserweiternd. Mit CleanCut-Kappe und Längenskala. Legen mit Ultrapak-Legeinstrumenten, gezahnt oder glatt.

Der Ablauf:

- Sulcus des präparierten Zahns feucht lassen.
- Blutende Stellen mit Spritze mit aufgesetztem Metal Dento Infusor Tip, gefüllt mit ViscoStat, Astringedent oder Astringedent X behandeln: Spritze im „Federhaltergriff“ halten; etwas Gel / Flüssigkeit herausdrücken und – unter gewisser Druckanwendung – Sulcus ausreiben.
- ↓
- Während des Ausreibens und danach mit Wasserspray übersprühen, ggf. durch Helferin.
- ↓
- Wenn alle Blutungen stehen:
Sulcus mit kräftigem Spraystrahl aussprayen – als Schlussreinigung und Test der Blutstillung.
- ↓
- Falls erforderlich, erneut blutende Stellen nachreiben – und danach auch erneut absprayen.
- ↓
- Ultrapak-Fäden auswählen; Empfehlung: Im Zweifel eine dickere Stärke wählen.
(Ultrapak-Fäden pressen sich – dank Schlauchform – zusammen.)
- ↓
- Ultrapak-Fäden mit ViscoStat, Astringedent oder Astringedent X tränken und in Sulcus einbringen.
Empfehlung: Mit Ultrapak-Legeinstrument gezahnt oder glatt.
- ↓
- Beim Legen aus den Fäden herausgepresstes Gel / Flüssigkeit absprayen.
- ↓
- Ultrapak-Fäden ca. 1-3 Min. liegen lassen.
(Diese kurze Zeit genügt – Blutungen wurden vorher gestillt, es wird lediglich die Retraktion vollendet.)
- ↓
- Ultrapak-Fäden entnehmen, Sulcus erneut aussprayen, trockenblasen.
- ↓
- Präparation und Retraktions-Ergebnis begutachten.
- ↓
- Abformung nehmen.

Diese Kurzanleitung ist als Überblick gedacht; sie ersetzt nicht die Anleitungen der Einzelprodukte.
Bitte lesen Sie die mitgelieferten Einzelanleitungen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Materialien einsetzen.