

# neodisher® MediKlar special

Liquide de rinçage en laveurs désinfecteurs pour les instruments thermostables et thermolabiles. Concentré liquide



## Principaux domaines d'utilisation :

Pour le rinçage en machine des dispositifs médicaux, incluant les instruments pour l'ophtalmologie, les ustensiles d'anesthésie, les containers, les implants ou les biberons. Rinçage aussi des lits en cabines de décontamination selon les recommandations des fabricants.

## Propriétés :

neodisher MediKlar special :  
Sèche rapidement la surface du matériel traité grâce ses qualités mouillantes même sur les plastiques.  
Réduit le temps de séchage.  
Neutralise les résidus alcalins.  
Réduit la formation de traces lors de l'utilisation d'une eau adoucie pendant le rinçage final. Les éléments d'anesthésie en polysulfon (PSU) ainsi qu'en polyphenylensufon (PPSU) comme par exemple les connecteurs des masques laryngés, les clapets, adaptateurs et les pièces de couvercle de container peuvent se fissurer au contact de certains liquides de rinçage. Vérifier la compatibilité au préalable.

## Utilisation et dosage :

Pour le rinçage des instruments chirurgicaux, ustensiles d'anesthésie, containers, implants et biberons :  
0,2 - 0,4 ml/l dans le doseur de la machine au rinçage final  
Pour le rinçage des lits en cabine de lavage :  
0,2 - 0,8 ml/l  
Pour le rinçage final, nous recommandons d'utiliser de l'eau déminéralisée, cela évite les traces d'eau. Ne pas mélanger avec d'autres produits.  
Les machines et systèmes de dosage doivent être compatibles. Lors des changements de produit effectuer un rinçage complet du système de dosage ainsi que des tuyaux à l'eau. Le traitement du matériel doit être conforme à la réglementation sur les dispositifs médicaux. Respecter les recommandations des fabricants de laveurs-désinfecteurs et des fabricants d'instruments selon EN ISO 17664.  
Pour un usage professionnel uniquement

## Données techniques :

Poids spécifique à 20° C : 1,05 g/cm<sup>3</sup>  
Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 0,2 – 0,8 ml/l : 4,0 - 3,5  
Viscosité (concentré, 20° C) : < 50 mPas

## Composants :

Composants selon la réglementation européenne sur les détergents 648/2004 :  
< 5 % phosphonate, 15 - 30 % tensioactifs non ioniques  
Agents de conservation (Methylchloroisoithiazolinone/Methylisothiazolinone)

## Marquage CE :

neodisher MediKlar special est conforme au décret No. 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux et à la directive européenne 93/42/CEE.

## Stockage :

Stocker à l'abri du gel. Conserver à température entre 0 et 30°C.  
Valable 3 ans dans les conditions de stockage indiquées. Utilisable jusque : voir sur l'étiquette après le symbole 

## Indications de risques et consignes de sécurité :

neodisher MediKlar special n'est pas un produit classé dangereux selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes.

Eliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité.

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.

Celles-ci sont disponibles sur : [www.drweigert.fr](http://www.drweigert.fr) - rubrique « service ».

FT 4073/2-1

04/12

DrWeigert France SAS- 22, avenue des Nations - Immeuble Raspail - BP 88035 Villepinte- 95932 ROISSY CDG CEDEX  
Tel : 01.48.67.90.33 - Fax : 01.48.67.29.14 - Email : [info@drweigert.fr](mailto:info@drweigert.fr) - [www.drweigert.fr](http://www.drweigert.fr)



**DR. WEIGERT**

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas être déduite.