

**CS 3800**  
**Sicherheitshinweise**

# Hinweis

© Carestream Dental LLC, 2021. Änderungen vorbehalten. Weder Carestream Dental LLC noch eine der Niederlassungen haftet für Fehler in diesem Dokument oder Folgeschäden, die aus der Bereitstellung, dem Inhalt oder der Verwendung dieses Dokuments entstehen. Kein Bestandteil dieses Handbuches darf ohne Zustimmung von Carestream Dental LLC vervielfältigt werden.

Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Originaltext des Dokuments in englischer Sprache.

Die CS 3800 ist ausschließlich für professionelle Anwender gedacht.

Gemäß US-amerikanischen Gesetzen darf dieses Gerät nur von Zahnärzten oder in deren Auftrag handelnden Personen erworben werden.

Wenn ein schwerwiegender Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Gerät auftritt, muss der Anwender dies Carestream Dental und der zuständigen Behörde seines Mitgliedstaates in der Europäischen Union melden.

Name des Handbuches: *CS 3800 – Sicherheitshinweise*

Teilenummer: TA3979\_de

Versionsnummer: 01

Druckdatum: 2021-05



**Carestream Dental LLC**  
3625 Cumberland Boulevard, Suite 700  
Atlanta, GA USA 30339

# CS 3800 – Sicherheitshinweise

## Warnungen und Sicherheitshinweise



### GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG

Dies ist ein elektrisches Gerät. Setzen Sie es NICHT Spritzwasser aus. Eine solche Handlung könnte zu Stromschlag oder Funktionsstörungen des Gerätes führen.



**WICHTIG:** Alle bekannten Restrisiken, Kontraindikationen oder unerwünschten Nebenwirkungen sind in dieser Anleitung aufgeführt. Wenn ein schwerwiegender Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Gerät auftritt, müssen Sie dies Carestream Dental und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaates in der Europäischen Union melden.



## Warnungen

### CS 3800:

- Sie **MÜSSEN** diese Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und dürfen den Scanner erst einsetzen, wenn Sie alle Sicherheitshinweise verstanden haben.
- Dieser Scanner darf nur innerhalb von Krankenhäusern und anderen professionellen Gesundheitseinrichtungen verwendet werden und darf nicht in der Nähe von chirurgischen Hochfrequenzgeräten sowie von HF-abgeschirmten Räumen eines ME-Systems zur Magnetresonanz- bzw. Kernspin-Bilderfassung eingesetzt werden, wo die Intensität elektromagnetischer Störungen hoch ist.
- Vergewissern Sie sich vor Verwendung des Scanners, dass am Gerät sowie an sämtlichem Zubehör keine rauen Oberflächen, scharfen Kanten oder andere Teile hervorstehen, die zu einer Sicherheitsgefahr führen können.
- Sie sind für den Betrieb und die Wartung des Scanners verantwortlich. Für die Verwendung dieses Scanners **MÜSSEN** Sie an einer Schulung teilnehmen.
- Platzieren Sie **KEINE** Gegenstände im Betriebsradius des Gerätes.

- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass der Scanner **AUSGESCHALTET** ist.
- Der Scanner darf **NICHT** in sauerstoffreichen Umgebungen verwendet werden. Dieses Gerät ist nicht für einen Einsatz mit leicht entzündlichen Anästhetika oder anderen brennbaren Medien vorgesehen.
- Ziehen Sie **NICHT** am Kabel und verdrehen Sie dieses **NICHT**.
- Lassen Sie den Scanner oder die Stromversorgungseinheit **NICHT** fallen.
- Setzen Sie den Scanner **NICHT** Wassernebel aus und tauchen Sie ihn **NICHT** in Wasser oder in Desinfektionsmittel ein.
- Sterilisieren Sie den Scanner **NICHT** mit Hitze.
- Setzen Sie den Scanner **KEINEN** starken Vibrationen aus.
- Setzen Sie den Scanner **NICHT** direkt ultravioletter Strahlung aus. Der Scanner ist nicht für Ultraviolett-Desinfektion ausgelegt.
- Blicken Sie nicht in das LED-Austrittsfenster.
- Wenn die Spitze entfernt ist, bringen Sie die Gummiabdeckung an, um das Fenster der Scannerlinse zu schützen.
- Entfernen Sie **KEINE** Abdeckung von Komponenten des Scanners. Der Scanner enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich bezüglich Reparaturarbeiten an einen qualifizierten Carestream Dental Servicetechniker.
- Ersetzen Sie die mit dem Scanner gelieferten Kabel **NICHT** durch andere Kabel. Dadurch kann der Scanner beschädigt werden, weiterhin können Sicherheitsschutz und EMV-Verhalten des Scanners beeinträchtigt werden.
- Ersetzen Sie das mit dem Scanner gelieferte Netzteil **NICHT** durch ein anderes Netzteil. Modelle anderer Hersteller verfügen möglicherweise nicht über den erforderlichen Schutz vor elektrischem Schlag und anderen Sicherheitsgefahren.
- Alle nicht der IEC 60601 entsprechenden Geräte müssen sich mindestens 1,83 Meter entfernt vom Patienten befinden.
- Wenn das Gerät einen Fehler aufweist, schalten Sie es aus (O), weisen Sie mit einem Schild auf die Betriebsstörung hin (z. B. „Außer Betrieb“) und kontaktieren Sie einen qualifizierten Carestream Dental Servicetechniker.
- Die Verwenden von anderen Komponenten, Zubehör, Kabeln und Ersatzteilen als den hier angegebenen oder den vom Gerätehersteller gelieferten können den Sicherheitsschutz des Scanners beeinträchtigen und zu einer erhöhten elektromagnetischen Strahlung oder einer verringerten elektromagnetischen Störfestigkeit des Geräts und in der Folge zu Fehlfunktionen führen.
- Sie dürfen an diesem Gerät keine Änderungen vornehmen.
- An das System dürfen keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel angeschlossen werden.

- Die maximale Temperatur des Teils mit Patientenkontakt kann bis 43 °C erreichen. Um Überhitzungen zu vermeiden, setzen Sie es nicht für einen längeren Zeitraum ein.
- Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den Ein-/Aus-Schalter für 2 Sekunden gedrückt. Um das Gerät an allen Polen von der Netzversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- Positionieren Sie das Gerät stets so, dass der Adapter problemlos aus der Steckdose gezogen werden kann.

### Computer:

- Stellen Sie den Computer und die an die Kamera angeschlossenen Peripheriegeräte NICHT in die unmittelbare Nähe des Patienten. Halten Sie einen Mindestabstand von 1,83 Metern zwischen dem Patienten und den Geräten ein.
- Der Scanner ist nur für den Anschluss an einen Computer vorgesehen, der ein Prüfzertifikat gemäß der letzten Ausgabe der anwendbaren Sicherheits- und EMV-Normen hat. Das Anschließen des Scanners an andere Geräte ist gefährlich.
- Informationen zu Datenverarbeitungssystem, Computer und Bildschirm entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch für Ihren Computer. Lassen Sie genügend Freiraum um den Computer, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
- Zur Optimierung der Bildqualität und des Sehkomforts stellen Sie den Bildschirm so auf, dass es zu keinen Lichtreflexionen von internen und externen Lichtquellen kommt.

### Akku

- Zerlegen, öffnen oder schreddern Sie Sekundärzellen oder Batterien nicht.
- Setzen Sie Zellen oder Batterien nicht Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.
- Schließen Sie eine Zelle oder eine Batterie nicht kurz. Bewahren Sie Zellen oder Batterien nicht wahllos in einem Kasten oder einer Schublade auf, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Nehmen Sie eine Zelle oder Batterie erst dann aus der Originalverpackung, wenn sie für den Gebrauch benötigt wird.
- Setzen Sie die Zellen oder Batterien nicht mechanischen Stößen aus.
- Sollte eine Zelle undicht sein, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Waschen Sie bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

- Verwenden Sie nur das Ladegerät, das speziell für das Gerät vorgesehen ist. Beachten Sie die Ladeanweisungen des Herstellers oder des Gerätehandbuchs.
- Verwenden Sie keine Zellen oder Batterien, die nicht für das Gerät vorgesehen sind.
- Kaufen Sie immer den vom Gerätehersteller empfohlenen Akku für das Gerät.
- Halten Sie Zellen und Batterien sauber und trocken.
- Wischen Sie die Zellen- oder Batteriepole mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie verschmutzt sind.
- Lassen Sie eine Akku nicht längere Zeit geladen, wenn er nicht verwendet wird.
- Nach längerer Lagerung kann es notwendig sein, die Zellen oder Batterien mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erreichen.
- Bewahren Sie die Original-Produktliteratur zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie die Zelle oder Batterie nur für die Anwendung, für die sie vorgesehen ist.
- Entfernen Sie nach Möglichkeit den Akku aus dem Gerät, wenn dieses nicht benutzt wird.
- Entsorgen Sie Batterien ordnungsgemäß.

#### Entsorgung:



Dieses Gerät enthält bestimmte Materialien und chemische Substanzen, die bei der Herstellung elektrischer und elektronischer Geräte entstehen, weshalb eine unsachgemäße Entsorgung eines solchen Geräts am Ende seiner Nutzungsdauer eine Umweltbelastung darstellen kann. Daher darf das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss bei einem zugelassenen Entsorgungs- oder Recycling-Center für Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott erhalten Sie bei der für Sie zuständigen Behörde.

Entsorgen Sie die Scannerspitzen gemäß den Standardbetriebsverfahren oder den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von kontaminiertem medizinischem Abfall. Weitere Tipps zum Scanner erhalten Sie von Ihrem Händler.

## Reinigen, Desinfizieren, Sterilisieren

### Reinigen und Desinfizieren des Scanners



#### WARNUNGEN

- Lesen und befolgen Sie vor Gebrauch die Warnungen und Anweisungen zum persönlichen Schutz im Sicherheitsdatenblatt (SDS = Safety Data Sheet) des Desinfektionsmittels, das zur Desinfektion des Scanners verwendet wird.
- Tragen Sie beim Reinigen und Desinfizieren des Scanners Handschuhe.
- Der Scanner muss mit einer bei der Environmental Protection Agency (EPA) der USA registrierten Desinfektionsmittellösung mittlerer Stufe mit tuberkulozider Wirkung oder einer Desinfektionsmittellösung mit CE-Kennzeichen desinfiziert werden.
- Verwenden Sie **KEINE** Desinfektionsmittel, die Phenole oder Iodophore enthalten; andernfalls wird die Oberflächenbeschichtung des Scanners beschädigt.
- Stellen Sie den Scanner niemals in einen Autoklaven bzw. tauchen Sie ihn niemals in Wasser oder in die Desinfektionslösung ein.
- Zu große Mengen Flüssigkeit können den Scanner beschädigen. Verwenden Sie keine mit Desinfektionsmittel getränkte Baumwolle, Tücher oder Gewebe, um den Scanner zu desinfizieren.

### Reinigung des Lesegeräts


Wenn der Scanner sichtbar mit Blut und/oder Körperflüssigkeiten kontaminiert ist, müssen Sie ihn vor dem Desinfizieren reinigen.

So reinigen Sie den Scanner:

- 1 Feuchten Sie ein fusselfreies Tuch mit lauwarmem Wasser an (**nicht trinken**).
- 2 Entfernen Sie das Blut und/oder Körperflüssigkeiten mit dem angefeuchteten, fusselfreien Tuch.



**Vorsicht: Berühren Sie NICHT die Kontaktstellen der Batterie oder des Scanners. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Abdeckung eindringt.**

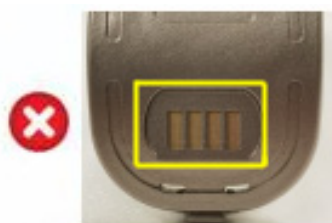

## Desinfizieren des Scanners

Der Scanner muss nach jeder Benutzung sorgfältig desinfiziert werden.

Befolgen Sie die Anweisungen des Desinfektionsmittel-Herstellers hinsichtlich der Einwirkzeit, um den Scanner zuverlässig zu desinfizieren.



**Wichtig:** Wenn der Scanner sichtbare Verunreinigungen aufweist, muss er vor der Desinfektion gründlich gesäubert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Reinigung des Lesegeräts.“

So desinfizieren Sie den Scanner:

- 1 Nehmen Sie die wiederverwendbare Spitze ab.
- 2 Entfernen Sie alle sichtbaren Verunreinigungen (siehe ["Reinigung des Lesegeräts"](#) ).
- 3 Verwenden Sie ein Reinigungstuch mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel mit mittlerer Schutzstufe. Beachten Sie die Herstelleranweisungen hinsichtlich der Einwirkzeit.

Zugelassene Desinfektionstücher: Mikrocid AF Jumbo Wipes, CaviWipes, Oxivir Tb Wipes, Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes, PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Wipes.



**WARNUNG:** Die Verwendung eines nicht genehmigten Desinfektionsmittels kann den Scanner beschädigen.

- 4 Wischen Sie alle Oberflächen des Scanners gründlich ab. Achten Sie darauf, dass KEINE Flüssigkeit durch den Spalt, den Luftauslass oder die Stiftlöcher eindringt.







**WARNUNG:** Nicht abspülen.

- 5 Lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- 6 Verwenden Sie nach dem Trocknen des Scanners ein sauberes, fusselfreies und mit Wasser befeuchtetes Tuch, um Rückstände des Desinfektionsmittels von der Oberfläche des Scanners zu entfernen.

## Reinigen und Sterilisieren der Scannerspitzen

Vom Hersteller gelieferte Scannerspitzen sind NICHT sterilisiert. Vor dem ersten Einsatz müssen Sie die Spitzen sterilisieren.

**Wenn Sie die Belichtungszeit bei 134 °C auf nicht mehr als 4 Minuten begrenzen, können Sie die Spitze bis zu 110 Mal autoklavieren.**



### WARNUNGEN

- Tragen Sie bei der Handhabung einer kontaminierten Scannerspitze Schutzhandschuhe.
- Lesen und befolgen Sie vor der Sterilisation die im Sicherheitsdatenblatt des Reinigungsmittels, das zur Reinigung der Scannerspitze verwendet wird, enthaltenen Warnungen und Anweisungen des Herstellers zum persönlichen Schutz.
- Weichen Sie die Scannerspitzen nicht über Nacht in Desinfektionsmittel ein.
- Trocknen Sie die Scannerspitzen gründlich ab, bevor Sie diese auf den Scanner setzen.
- Verwenden Sie keine Ultraschall-Reinigungsmaschine zur Reinigung der Scannerspitzen.

## Manuelle Reinigung der Scannerspitzen

So reinigen Sie die Scannerspitzen manuell:

- 1 Spülen Sie die Spitze ab, um übermäßige Verunreinigungen zu entfernen.
- 2 Tragen Sie mit einer weichen Bürste eine Enzymreinigerlösung (z. B. Metrex EmPower) auf alle Oberflächen auf.
- 3 Spülen Sie unter sauberem, laufendem Wasser.

- 4 Inspizieren Sie die Spitze. Wenn die Spitze nicht sauber ist, wiederholen Sie die Schritte.
- 5 Verwenden Sie ein Linsentuch oder ein fussselfreies Tuch zum Entfernen von Staub auf dem Spiegel in der Spitze.

### Reinigen der Scannerspitzen in einem automatischen Waschgerät oder Desinfektionsgerät

So reinigen Sie die Scannerspitzen in einem automatischen Waschgerät oder Desinfektionsgerät:

- 1 Spülen Sie die Spitze ab, um übermäßige Verunreinigungen zu entfernen.
- 2 Tragen Sie mit einer weichen Bürste eine Enzymreinigerlösung (z. B. Metrex EmPower) auf alle Oberflächen auf.
- 3 Geben Sie die Spitze in das automatische Wasch- oder Desinfektionsgerät.
- 4 Führen Sie den Reinigungszyklus entsprechend den Anweisungen des Geräteherstellers aus.
- 5 Wenn das Gerät über keinen automatischen Spülzyklus verfügt, muss durch sorgfältiges Eintauchen in sauberes Wasser gespült werden, um Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.
- 6 Verwenden Sie ein Linsentuch oder ein fussselfreies Tuch zum Entfernen von Staub auf dem Spiegel in der Spitze.

### Sterilisieren der Scannerspitzen



**Hinweis:**

**Wenn Sie die Belichtungszeit bei 134 °C auf nicht mehr als 4 Minuten begrenzen, können Sie die Spitze bis zu 110 Mal autoklavieren.**

So sterilisieren Sie die Scannerspitzen:

- 1 Legen Sie die Spitze in einen von der FDA zugelassenen bzw. mit CE-Kennzeichen versehenen, dicht verschlossenen Sterilisationsbeutel. Der Beutel muss luftdicht verschlossen sein. Verwenden Sie selbstklebende oder verschweißte Beutel.
- 2 Geben Sie die Spitzen für die folgenden Zeiten in einen Dampfautoklaven:

Vorvakuumentoklav		
Belichtungszeit bei 132 °C	Belichtungszeit bei 134 °C	Minimale Trocknungszeit
Mindestens 4 Minuten	Mindestens 3 Minuten	20-30 Minuten

## Gravitationsautoklav

Belichtungszeit bei 132 °C	Belichtungszeit bei 134 °C	Minimale Trocknungszeit
Mindestens 15 Minuten	Mindestens 10 Minuten	15-30 Minuten



**Wichtig:** Überschreiten Sie die nicht die Temperatur von 134 °C.

## Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung

Führen Sie vor der Verwendung die folgenden Tätigkeiten an Ihrem Scanner und dem Zubehör durch.

## Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren

Führen Sie die folgenden Wartungsarbeiten an Ihrem Scanner und dem Zubehör sorgfältig durch, um eine maximale hygienische Sicherheit für den Patienten zu gewährleisten und das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren.

Nach jedem Patienten:

- Reinigen und desinfizieren Sie den Scanner. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „[Reinigen und Desinfizieren des Scanners](#)“ auf Seite 5.
- Reinigen und sterilisieren Sie die Spitze des Scanners. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „[Reinigen und Sterilisieren der Scannerspitzen](#)“ auf Seite 7.

## Prüfen des Scanners auf sichtbare Beschädigungen

Führen Sie eine Sichtprüfung des Scanners auf Beschädigungen oder Anzeichen einer Alterung durch:

- Untersuchen Sie das Linsenfenster des Scanners.
- Untersuchen Sie den Bereich um die Scannertasten und die Kontakte.

Wenn Sie Beschädigungen feststellen, verwenden Sie den Scanner nicht weiter und wenden Sie sich an Ihre zuständige Vertretung.

## Visuelle Überprüfung der Scanner-Spitzen

Führen Sie eine Sichtprüfung der Scannerspitzen auf äußerliche Beschädigung mit folgenden Schritten durch:

- Vergewissern Sie sich, dass die Spitze nicht beschädigt ist und sich ihre Komponenten nicht gelöst haben.
- Stellen Sie sicher, dass der Spitzenspiegel keine Flecken oder Kratzer aufweist.

Wenn Sie eine Alterung feststellen, tauschen Sie die Spitze aus.



### **WARNUNGEN**

- **Das Linsenfenster des Scanners ist eine empfindliche optische Komponente. Montieren Sie die vordere Schutzabdeckung, um das Linsenfenster vor Beschädigung und Verschmutzung zu schützen, wenn der Scanner nicht in Gebrauch ist.**
- **Der Spiegel in der Spitze ist ein empfindliches optisches Bauteil. Seine saubere und unbeschädigte Oberfläche ist entscheidend für die Scanqualität.**

Falls Sie eine schlechte Scanqualität oder eine unscharfe Videovorschau in der Software sehen, reinigen Sie den Spitzenspiegel und das Linsenfenster des Scanners mit einem Mikrofaser-Reinigungstupfer und etwas Ethanol, das frei von Verunreinigungen ist.

# Konformitätserklärung



Carestream Dental LLC  
3625 Cumberland Boulevard, Suite 700,  
Atlanta, GA USA 30339

## RED-Konformitätserklärung

Carestream Dental LLC erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die aufgeführten Produkte in Übereinstimmung mit ANHANG II der Richtlinie über Funkanlagen [Richtlinie 2014/53/EU] hergestellt wurden.

Name und Adresse des Herstellers:	Carestream Dental LLC 3625 Cumberland Boulevard, Suite 700, Atlanta, GA USA 30339
Produkt- und Handelsname:	CS 3800 Wireless „Ende der Liste“
Anwendungsbereich:	Alle deklarierten Produkte“
Autorisierte Vertretung für Europa:	Trophy 4, Rue F. Pelloutier Croissy-Beaubourg 77435 Marne-la-Vallée, Cedex 2 Frankreich
Angewandte Normen:	EN 301 489-1 V2.2.3: 2019 EN 301 489-17 V3.2.4: 2020 EN 301 893 V2.1.1: 2017
Unterzeichnet für und im Namen von:	Carestream Dental LLC
Ort der Ausgabe	Trophy 4, Rue F. Pelloutier Croissy-Beaubourg 77435 Marne-la-Vallée, Cedex 2 Frankreich
Datum der Ausgabe	29. März 2021

Marie-Pierre Labat-Camy  
Global Regulatory Affairs Senior Manager

---

Carestream Dental LLC  
3625 Cumberland Boulevard, Suite 700, Atlanta, GA USA 30339

Seite 1 von 1

# Elektronische Auszeichnung



Dieses Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass die Gebrauchsanweisungen (Benutzer- und Installationshandbuch sowie Sicherheits- und Vorschriftenhandbuch) für das Produkt in elektronischer Form im Hilfemenü der Software und auf unserer Webseite [www.carestreamdental.com/documentation](http://www.carestreamdental.com/documentation) verfügbar sind.



**Hinweis:** Sie benötigen einen Computer mit Bildschirm und einer Maus. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer Adobe Acrobat Reader installiert ist. Falls Sie nicht über das Programm verfügen oder nicht sicher sind, ob Sie darüber verfügen, können Sie die aktuelle Gratis-Version unter <https://get.adobe.com/reader/> herunterladen.

Um auf die Website mit der Gebrauchsanweisung zuzugreifen, benötigen Sie eine Internetverbindung.

## Zugriff auf die Gebrauchsanweisung auf der Website von Carestream Dental

So greifen Sie auf die Gebrauchsanweisung auf der Website von Carestream Dental zu:

- 1 Rufen Sie die [Website www.carestreamdental.com/documentation](http://www.carestreamdental.com/documentation) auf.
- 2 Wählen Sie das Produkt aus, zu dem Sie die Gebrauchsanweisung benötigen.
- 3 Öffnen Sie die PDF-Datei mit der Gebrauchsanweisung in der gewünschten Sprache.

Sie können die Gebrauchsanweisung anzeigen, speichern und ausdrucken.

Auf Anforderung senden wir Ihnen innerhalb von 7 Tagen ein Gratis-Exemplar der ausgedruckten Gebrauchsanweisung zu. Zu diesem Zweck können Sie das Bestellformular auf unserer Website verwenden.