



30+

Jahre Erfahrung



100+

Millionen strahlende Lächeln



50+

Branchenauszeichnungen
im Bereich Zahnaufhellung



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
FOLGEN SIE UNS! 

Hellen Sie Ihre Zähne auf – am besten noch heute!

Zögern Sie nicht länger, um endlich das Lächeln zu bekommen, das Sie sich schon immer gewünscht haben.

Fragen Sie Ihr Praxisteam nach einer Zahnaufhellung mit Opalescence Go™, die Sie ganz bequem zu Hause durchführen können. Schließen Sie sich Millionen anderer Menschen an, die ihr Lächeln bereits aufgehellt und ihr Leben zum Strahlen gebracht haben!

IHR PRAXISTEAM



ERFAHREN SIE MEHR UNTER [OPALESCENCE.COM/DE](https://www.opalescence.com/de)

1 Basting RT, Rodrigues AL Jr, Serra MC. The effects of seven carbamide peroxide bleaching agents on enamel microhardness over time. *J Am Dent Assoc.* 2003;134(10):1335-42.
2 Al-Qunaian TA. The effect of whitening agents on caries susceptibility of human enamel. *Oper Dent.* 2005;30(2):265-70.

UPP 215-DE 06-2021

© 2021 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.



Opalescence



NR. 1 IN DER PROFESSIONELLEN ZAHNAUFHELLUNG WELTWEIT



SPRECHEN SIE MIT UNS ÜBER
DIE ZAHNAUFHELLUNG!



OPALESCENCE GO™ VORGEFÜLLTE EINWEGTRAYS

Professionelle Zahnaufhellung "ready-to-go"

Die Opalescence Go™ Zahnaufhellung ist sehr leistungsstark und effektiv und daher ausschließlich über zahnmedizinische Praxen erhältlich. Mit dieser mehrfach preisgekrönten Aufhellungsbehandlung können nachweislich beeindruckende, lang anhaltende Ergebnisse erzielt werden.

Vorgefüllte Einwegtrays

Die vorgefüllten Opalescence Go™ Einwegtrays enthalten ein leistungsstarkes Aufhellungsgel. Die angenehm zu tragenden Trays werden einfach in den Mund eingesetzt, wo sie während der empfohlenen Tragezeit verbleiben. Anschließend sind die Zähne deutlich heller und strahlender!


Effektiv und einfach in der Anwendung

Opalescence Go™ Trays mit 6 % Wasserstoffperoxid-Gel werden 5 bis 10 Tage lang täglich zwischen 60 und 90 Minuten getragen. Die Behandlung ist sehr effektiv und dabei erschwinglich. Mit dem anpassungsfähigen UltraFit™ Tray wird die Zahnaufhellung zudem äußerst komfortabel.

UltraFit™ Trays passen sich bequem an jedes Lächeln an



UltraFit Tray vorher

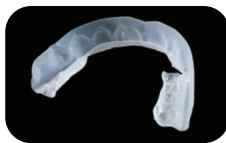

UltraFit tray nach nur
10 Minuten im Mund

Sie möchten wissen, ob eine Zahnaufhellung für Sie geeignet ist? Fragen Sie Ihr Praxisteam!

INFORMATIONEN ZUR ZAHNAUFHELLUNG



Wie funktioniert die Zahnaufhellung?

Opalescence™ Zahnaufhellungsgel enthält einen aktiven zahnaufhellenden Bestandteil. Die aktiven Sauerstoffmoleküle können in den Zahnschmelz eindringen. Dort reagieren sie mit den verfärbten Molekülen, welche die Zahnverfärbung verursachen, und sorgen für eine Neutralisation. Die aktiven Sauerstoffmoleküle verteilen sich und hellen den gesamten Zahn auf.

Verursacht eine Zahnaufhellung Empfindlichkeiten?

Zahnempfindlichkeiten können infolge einer Zahnaufhellung auftreten. Sie sind nur vorübergehend und vergehen in der Regel innerhalb weniger Tage nach dem Abschluss der Behandlung. Zur Behandlung bzw. Vorbeugung können Maßnahmen zur Desensibilisierung ergriffen werden.

Greift die Zahnaufhellung mit Opalescence™ meine Zähne an?

Nein. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass Opalescence™ Zahnaufhellungsprodukte die Zähne angreifen.^{1,2}

Wie lange halten die Ergebnisse?

Die Ergebnisse sind sehr stabil, sodass Sie sich noch lange nach der Behandlung an Ihrem umwerfenden Lächeln erfreuen können. Allerdings können diverse Faktoren zur Beeinträchtigung der hellen Zahnfarbe führen, beispielsweise die Ernährung oder Gewohnheiten wie das Rauchen. Auffrischungsbehandlungen können schnell und einfach durchgeführt werden, so dass Sie wieder ein strahlend weißes Lächeln erhalten.

FÜR WEN EIGNET SICH EINE ZAHNAUFHELLUNG?

Erfolgreiche Zahnaufhellungen können nahezu bei jeder Person durchgeführt werden. Patient:innen jeden Alters hellen ihre Zähne auf – von jungen Erwachsenen bis hin zu 90-Jährigen. Eine kosmetische Zahnaufhellung ist gesetzlich ab 18 Jahren zulässig.

VORHER/NACHHER



Vor der Zahnaufhellung mit Opalescence Go™



Nach der Zahnaufhellung mit Opalescence Go™

WARUM OPALESCENCE?

