



# Speicherfolien richtig positionieren mit dem „VistaPosition PSP Haltersystem“

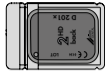


Zur Erhaltung der Speicherfolie und für optimale Bildqualität empfehlen wir die Verwendung einer original Dürr Dental Lichtschutzhülle.

Mehr Tipps & Tricks und die elektronische Gebrauchsanleitung finden Sie bei [www.duerrdental.com/intraoral-positioning](http://www.duerrdental.com/intraoral-positioning)

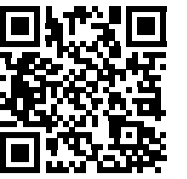



## 1. Bissflügel aufnahmen

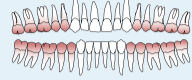


- Speicherfolie zwischen Zunge und Zahnbogen positionieren.
- Speicherfolie orthoradial ausrichten, um Interdentalraumüberlagerungen zu vermeiden.
- Bissplatte aktiv nach unten führen, bis sie auf der Zahnreihe aufliegt.
- Mund schließen.
- Visiererring möglichst nah an der Wange platzieren.
- Röntgentubus parallel zur Führungsstange ausrichten.
- Strahlenfeldbegrenzung entsprechend der Speicherfolienposition ausrichten.



## 2. Aufnahmen Endo

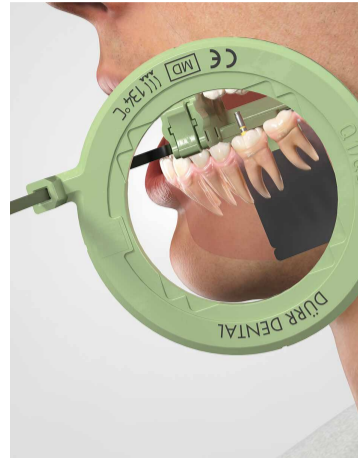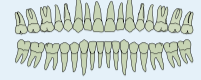


- Speicherfolie hinter dem zu erfassenden Zahn platzieren.
- Den Steg der Bissplatte mesial der Kofferdamklammer/Instrumente positionieren und sicherstellen, dass der Patient ihn nach dem Schließen gut fixiert.
- Visiererring möglichst nah an der Wange platzieren.
- Röntgentubus parallel zur Führungsstange ausrichten.
- Strahlenfeldbegrenzung entsprechend der Speicherfolienposition ausrichten.

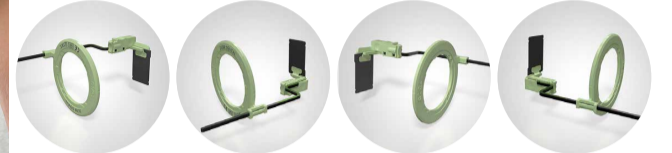


## 3. Unterkiefer Seitenzahnaufnahmen




- Speicherfolie zwischen Zunge und Zahnbogen platzieren.
- Bissplatte aktiv nach unten führen, bis sie auf der Zahnreihe aufliegt und sicherstellen, dass der Patient sie nach dem Schließen gut fixiert.
- Führungsstange horizontal aus dem Mund ragen lassen.
- Visiererring möglichst nah an der Wange platzieren.
- Röntgentubus parallel zur Führungsstange ausrichten.
- Strahlenfeldbegrenzung entsprechend der Speicherfolienposition ausrichten.

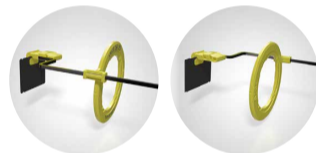


## 4. Oberkiefer Seitenzahnaufnahmen

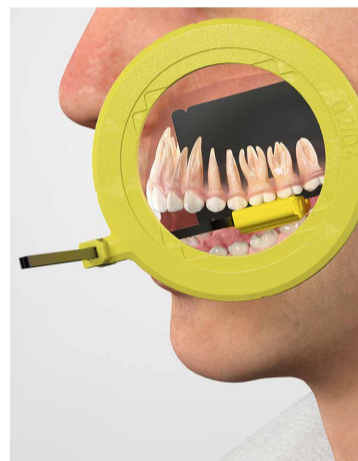

- Obere Kante der Speicherfolie am höchsten Punkt des Gaumens positionieren.
- Bissplatte an den bukkalen Höcker des zu erfassenden Zahns kippen.
- Mund schließen.
- Visiererring möglichst nah an der Wange platzieren.
- Röntgentubus parallel zur Führungsstange ausrichten.
- Strahlenfeldbegrenzung entsprechend der Speicherfolienposition ausrichten.

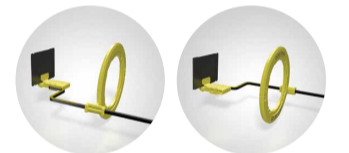


## 5. Unterkiefer Frontzahnaufnahmen

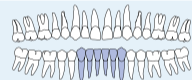

- Untere Kante der Speicherfolie am Zungenansatz hinter dem Frontzahnbereich platzieren.
- Bissplatte an die Schneidekante des zu erfassenden Zahns kippen.
- Patienten den Unterkiefer beim Schließen nach vorne schieben lassen.
- Die Führungsstange aktiv nach oben führen, sodass sie möglichst horizontal aus dem Mund ragt.
- Visiererring möglichst nah an der Wange platzieren.
- Röntgentubus parallel zur Führungsstange ausrichten.
- Strahlenfeldbegrenzung entsprechend der Speicherfolienposition ausrichten.




## 6. Oberkiefer Frontzahnaufnahmen

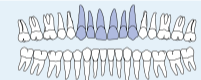

- Obere Kante der Speicherfolie an einer ausreichend breiten Stelle des Gaumens platzieren.
- Bissplatte an die Schneidekante des zu erfassenden Zahns kippen.
- Patienten den Unterkiefer beim Schließen nach vorne schieben lassen.
- Visiererring möglichst nah an der Wange platzieren.
- Röntgentubus parallel zur Führungsstange ausrichten.
- Strahlenfeldbegrenzung entsprechend der Speicherfolienposition ausrichten.





## 7. Unterkiefer Eckzahnaufnahmen

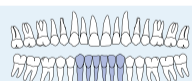

- Untere Speicherfolienkante am Zungenansatz hinter den Frontzähnen positionieren.
- Halter drehen, bis sich die Bissplatte über der Spitze des Eckzahns befindet.
- Patienten den Unterkiefer beim Schließen in Richtung des Eckzahns schieben lassen.
- Führungsstange während des Schließens aktiv nach oben führen, damit sie möglichst horizontal aus dem Mund ragt.
- Visiererring möglichst nah an der Wange platzieren.
- Röntgentubus parallel zur Führungsstange ausrichten.
- Strahlenfeldbegrenzung entsprechend der Speicherfolienposition ausrichten.



## 8. Oberkiefer Eckzahnaufnahmen

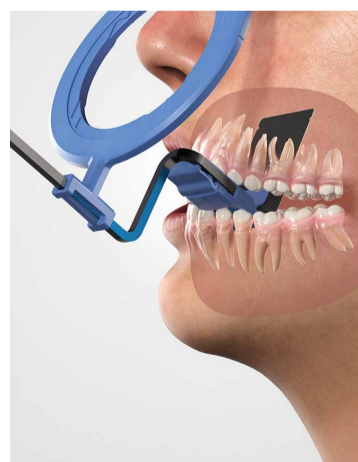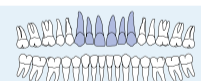

- Obere Kante der Speicherfolie an einer ausreichend breiten Stelle des Gaumens platzieren.
- Halter drehen, bis sich die Bissplatte unter der Spitze des Eckzahns befindet.
- Patienten den Unterkiefer beim Schließen in Richtung des Eckzahns schieben lassen.
- Visiererring möglichst nah an der Wange platzieren.
- Röntgentubus parallel zur Führungsstange ausrichten.
- Strahlenfeldbegrenzung entsprechend der Speicherfolienposition ausrichten.

